

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Nettoyage et désinfection des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection du tonomètre Pascal		Page 1 de 5
Préparé par : Chantal Belisle, conseillère, service de prévention des infections	Approuvé par : Direction des soins infirmiers et de la qualité	Date : 2013-11-11
		Révision :

1. Définition

Le tonomètre Pascal est un type d'équipement employé en ophtalmologie pour mesurer la pression intraoculaire. L'appareil étant utilisé pour plusieurs usagers, il doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

2. Buts

- ❖ Éviter la transmission de microorganismes pathogènes d'un usager à l'autre par contact direct et indirect;
- ❖ Respecter l'application des pratiques de base;
- ❖ Assurer l'intégrité de l'appareil;
- ❖ Prodiquer des soins de qualité;
- ❖ Procéder au nettoyage et à la désinfection de manière sécuritaire (pour les utilisateurs).

3. Matériel requis

- ❖ Gaine de protection (SensorCap)
- ❖ Alcool 70%
- ❖ Eau et savon doux (vaisselle)
- ❖ Chiffons non pelucheux
- ❖ Gaz comprimé de qualité optique (Dust off)
- ❖ Gants non stériles à usage unique

PROCÉDÉS**Nettoyage et désinfection quotidienne du tonomètre et entre chaque utilisateur**

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Mettre des gants non stériles à usage unique.
3. Retirer la gaine de protection de la pointe « Sensor Tip » du tonomètre (avant le 1^{er} cas du matin et entre chaque patient) (annexe 1).
4. Retirer les gants non stériles et procéder à l'hygiène des mains.
5. Nettoyer la pointe « Sensor Tip » avec un linge doux légèrement imbibé d'eau savonneuse (ne jamais immerger la pointe dans un liquide ou la placer sous l'eau courante) (annexe 1).
6. Vérifier l'intégrité de la pointe « Sensor Tip » du tonomètre, si présence de poussières utiliser un gaz inerte (dust off) pour les retirer. Si la pointe présente une détérioration, ne pas l'utiliser et aviser votre supérieur immédiat.
7. Désinfecter le boîtier du tonomètre avec un tampon d'alcool 70% pré-humidifié (annexe 1).
8. Couvrir la pointe « Sensor Tip » du tonomètre avec une nouvelle gaine de protection.

Rangement de l'instrument

1. Couvrir la pointe « Sensor Tip » du tonomètre désinfecté avec une nouvelle gaine de protection avant de ranger l'appareil.
2. Ranger le tonomètre et ses accessoires dans la boîte prévue à cet effet.

PRINCIPES

Respecter les pratiques de base.

Respecter les pratiques de base.

Respecter les pratiques de base.

Suivre les recommandations du fabricant.
Procéder délicatement afin d'éviter la dispersion de liquide dans la sonde.

Suivre les recommandations du fabricant.

Suivre les recommandations du fabricant.

Protéger la pointe « Sensor Tip » du tonomètre (préserver l'intégrité de l'appareil) et diminuer les risques d'infection pour l'usager.

Protéger la pointe « Sensor Tip » du tonomètre et préserver l'intégrité de l'appareil lors de l'entreposage.

References

Pascal user manual, version 4 September 2012 Ziemer ophthalmic systems


Consultation

Renée Gauthier, conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections

Lucie Moisan
Directrice des soins infirmiers et de la qualité

11 / 11 / 2013
date

ANNEXE 1

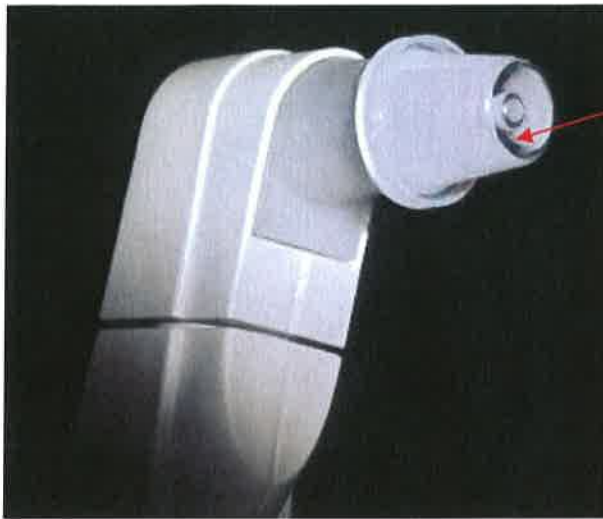


Gaine de protection



Pointe du tonomètre « Sensor »

ANNEXE 1 (SUITE)

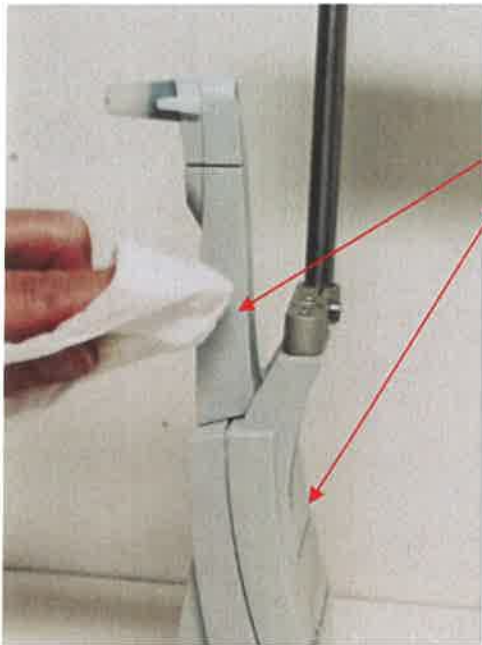

Nettoyage de la base du tonomètre



Boitier du tonomètre