

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Nettoyage et désinfection des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection du Tonomètre TONO-PEN XL		Page 1 de 5
Préparé par : Chantal Bélisle, conseillère, service de prévention des infections	Approuvé par : Direction des soins infirmiers et de la qualité	Date : 2013-11-11
		Révision :

1. Définition

Le tonomètre Tono-pen XL est un type d'équipement employé en ophtalmologie (à l'urgence et à l'unité de médecine familiale) pour mesurer la pression intraoculaire. L'appareil étant utilisé pour plusieurs usagers, il doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

2. Buts

- ❖ Éviter la transmission de microorganismes pathogènes d'un usager à l'autre par contact direct et indirect;
- ❖ Respecter l'application des pratiques de base;
- ❖ Assurer l'intégrité de l'appareil;
- ❖ Prodiquer des soins de qualité;
- ❖ Procéder au nettoyage et à la désinfection de manière sécuritaire (pour les utilisateurs).

3. Matériel requis

- ❖ Embouts de protection Ocu-Film
- ❖ Alcool 70%
- ❖ Gaz comprimé de qualité optique (Dust off)

PROCÉDÉS**Nettoyage et désinfection du tonomètre
quotidiennement ou avant la première utilisation
de la journée**

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Mettre des gants non stériles à usage unique.
3. Retirer l'embout de protection Ocu-film.
4. Retirer les gants non stériles et procéder à l'hygiène des mains.
5. Vaporiser du gaz comprimé sur l'embout de la sonde pendant deux secondes (annexe 1).
6. Attendre trois minutes pour laisser l'instrument se stabiliser.
7. Désinfecter le pourtour de l'embout de la sonde avec un tampon d'alcool 70% pré-humidifié (annexe1).
8. Désinfecter le Tono-pen XL avec un tampon d'alcool 70% pré-humidifié (annexe 1).
9. Couvrir l'embout de la sonde avec un nouveau protecteur Ocu-Film.

**Nettoyage et désinfection du tonomètre après
chaque utilisation**

1. Procéder à l'hygiène des mains.
2. Mettre des gants non stériles à usage unique.
3. Retirer l'embout de protection Ocu-film.
4. Retirer les gants non stériles et procéder à l'hygiène des mains.
5. Désinfecter le pourtour de l'embout de la sonde avec un tampon d'alcool 70% pré-humidifié (annexe 1).

PRINCIPES

Respecter les pratiques de base.

Respecter les pratiques de base.

Respecter les pratiques de base.

Suivre les recommandations du fabricant.

Suivre les recommandations du fabricant.

Suivre les recommandations du fabricant.
Procéder délicatement afin d'éviter la dispersion d'alcool dans la sonde. Préserver l'intégrité de l'appareil.

Suivre les recommandations du fabricant.

Préserver l'intégrité de l'embout du tonomètre et diminuer les risques de transmission d'infection pour l'utilisateur.

Respecter les pratiques de base.

Respecter les pratiques de base.

Respecter les pratiques de base.

Suivre les recommandations du fabricant.
Procéder délicatement afin d'éviter la dispersion d'alcool dans la sonde.
Préserver l'intégrité de l'appareil.

PROCÉDÉS

6. Désinfecter le Tono-pen XL avec un tampon d'alcool 70% pré-humidifié (annexe 1).
7. Couvrir l'embout de la sonde avec un nouveau protecteur Ocu-Film.

Rangement de l'instrument

1. Couvrir l'embout de la sonde du tonomètre désinfecté avec un nouveau protecteur Ocu-Film avant de ranger l'appareil.
2. Ranger le tonomètre et ses accessoires dans la boîte prévue à cet effet.

PRINCIPES

Suivre les recommandations du fabricant.

Préserver l'intégrité de l'embout du tonomètre.
Diminuer les risques de transmission d'infection chez l'utilisateur.

Protéger l'embout de la sonde et préserver l'intégrité de l'appareil lors de l'entreposage.

Références

Innovamed tono-pen XL cleaning instructions

Tono-pen XL guide du fabricant

Service bulletin, Tono-pen XL, Reichert technologies

Consultation

Renée Gauthier, conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections



Directrice des soins infirmiers et de la qualité

 11 nov 2013

date

TONOMÈTRE TONOPEN XL

Embout de protection Ocu-film



Vaporisation du gaz comprimé sur
l'embout de la sonde



Nettoyage et désinfection du pourtour
de l'embout de la sonde



Nettoyage et désinfection
du tonomètre