

Centre de santé et de services sociaux du Suroît 	PROCÉDURE CLINIQUE		
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION D'ÉQUIPEMENTS : BAINS, CIVIÈRES-DOUCHES			
Référence à : ☐ OIPE # ☐ Ordonnance collective ☐ Protocole ☐ Règle de soins	En vigueur le :	Révisé le : Mai 2012	Numéro : PC 1200-14-005

OBJET DE LA MÉTHODE

Au cours des dernières années, il a été observé que l'hydrothérapie est une forme de traitement couramment utilisée dans nos installations. Il est reconnu que ces équipements peuvent constituer des réservoirs pour les micro-organismes pathogènes. Afin de réduire le risque de contamination reliée à l'hydrothérapie auprès des utilisateurs, il est important de mettre en place des mesures pour assurer un nettoyage et une désinfection efficaces de ces équipements.

DOMAINE D'APPLICATION

Équipement d'hydrothérapie pour l'ensemble des installations du CSSS du Suroît à l'exception des baignoires d'hydromassage qui feront l'objet d'une procédure particulière.

INTERVENANT(S) CONCERNÉ(S)

Professionnels responsables du nettoyage et de la désinfection des bains et des civières-douches sur les unités.

DÉFINITION DE L'HYDROTHÉRAPIE

L'hydrothérapie se définit par l'utilisation externe de l'eau à des fins hygiéniques ou thérapeutiques.

- **Baignoire domestique** : Ce type d'équipement ressemble à la baignoire que l'on retrouve dans un milieu familial. Il n'est pas relié à un système de jets d'eau intégrés aux parois latérales.
- **Civière douche** : Ce type d'équipement permet aux utilisateurs avec des problèmes de mobilité restrictive de recevoir des soins d'hygiène.
- **Autres équipements** : Tous les autres équipements (ex : chaise, levier, etc.) utilisés pour favoriser l'aide à l'hydrothérapie doivent être nettoyés/désinfectés après chaque utilisation.

OBJECTIF(S)

Mettre en place une procédure détaillée de nettoyage/désinfection pour l'hydrothérapie et offrir des équipements sécuritaires aux usagers/résidents.

CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE

Tous les utilisateurs bénéficiant de soins d'hygiène via une baignoire/une civière-douche.

CONTRE-INDICATIONS POUR L'UTILISATION DE L'HYDROTHÉRAPIE

À cause du risque de contamination de l'environnement, les usagers/résidents ayant une infection active (Ex : *Clostridium difficile*, *gastroentérite*, *influenza*, etc.) ne devraient pas utiliser l'équipement d'hydrothérapie. Des soins d'hygiène au lit devraient être privilégiés pour ces usagers/résidents.

L'utilisation de l'hydrothérapie pourra être reprise à la fin de l'isolement ou devancée, selon les indications de l'équipe de prévention et contrôle des infections.

NIVEAU DE DÉSINFECTION DES ÉQUIPEMENTS

Il est recommandé d'effectuer une **désinfection intermédiaire** pour ces équipements.

PRINCIPES DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

- Le nettoyage doit toujours précéder la désinfection afin d'éliminer les matières organiques, souillures ou autres matières pouvant abriter des agents pathogènes et pouvant nuire à l'action du désinfectant.
- Éviter la vaporisation.
- Respecter la dilution des produits nettoyants /désinfectants émise par le fabricant et le temps de contact suggéré;
- Utiliser une tasse graduée.

N.B. S'assurer que les produits nettoyants/désinfectants soient remisés sous clé.

ÉTAPES DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Pour les baignoires domestiques/civières-douches et autres équipements, il est important entre chaque résident de :

- vider et rincer la baignoire/civière-douche;
- nettoyer les surfaces avec un détergent germicide;
- dévisser et nettoyer le bouchon pour le bain;
- rincer toutes les surfaces avant la désinfection;
- désinfecter avec **Accel Hydrothérapie+ 4% (1 :16) soit 320 mL dans 5 litres d'eau ou 64 cc dans 1 litre d'eau en respectant un temps de contact de 10 minutes** et les concentrations recommandées (# GRM 50988);
- Rincer.

N.B. Dans le cas d'un usager/résident avec un *Clostridium difficile*, vous nettoyez avec un germicide, rincez et désinfectez avec **une solution d'eau de javel 1 :10 (exemple 100 mL d'eau de javel pour 900 mL d'eau) en respectant un temps de contact de 10 minutes**. Utiliser l'équipement de protection recommandé ainsi que **des gants de nitrile**.

SOURCES / RÉFÉRENCES

Recommandations sur le nettoyage et la désinfection des équipements d'hydrothérapie des établissements de soins au Québec (2003).

PROCÉDURE CLINIQUE

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION D'ÉQUIPEMENTS : BAINS, CIVIÈRES-DOUCHES

Référence à :

- ☐ OIPE #
- ☐ Ordonnance collective
- ☐ Protocole
- ☐ Règle de soins

En vigueur le :

Révisé le :

Mai 2012

Numéro :

PC 1200-14-005

PROCESSUS D'ÉLABORATION / RÉVISION

Rédigé par

Lisanne Roy, Conseillère en prévention et contrôle des infections

Mai 2012

Personnes consultées (au besoin)

Sylvie Latreille, Conseillère cadre en prévention et contrôle des infections

Mai 2012

Claudette Giguère, Directrice réseau personne en perte d'autonomie

Mai 2012

Lyne Daoust, Directrice réseau santé physique

Mai 2012

PROCESSUS D'APPROBATION

Approuvé par



Philippe Besombes, Directeur de la qualité et des soins infirmiers

08 juillet 2014

Date