

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Nettoyage et désinfection « station patient » TELUS et de ses accessoires		Page 1 de 4
Préparé par : Daniel Beaulieu, conseiller en soins infirmiers (SCIAD) et Renée Gauthier, conseillère cadre à la prévention et contrôle des infections	Approuvé par : Directrice des soins infirmiers et de la qualité	Date : 24 novembre 2011
		Révision :

1. Définition

La « station patient » est un équipement électronique avec écran tactile destinée aux usagers inscrits au programme de surveillance via les télésoins à domicile du SCIAD. Il permet à l'utilisateur de transmettre des données à des professionnels d'une équipe multidisciplinaire pour un suivi adéquat de leur état de santé. À cet égard, l'équipement étant partagé, il doit être soumis à une méthode rigoureuse de nettoyage et de désinfection entre chaque utilisateur.

2. Buts

- Prévenir la transmission de microorganismes pathogènes par contact direct et indirect avec du matériel contaminé;
- Respecter les pratiques de base;
- Assurer l'intégrité de l'équipement;
- Prodiger des soins de qualité;
- Procéder au nettoyage et à la désinfection de manière sécuritaire.

3. Matériels requis

- Eau;
- Savon doux;
- Chiffons doux jetables;
- Lingette pré-imbibée d'eau de Javel à 0,55% (ex. : Chlorox);
- Équipement de protection personnelle (masque, blouse et gants).

PROCÉDÉS	PRINCIPES
Nettoyage de la « station patient » (base de la station, fil d'alimentation électrique, fil téléphonique valise de transport) entre chaque utilisateur. 1. Débrancher la « station patient ». 2. Procéder à l'hygiène des mains. 3. <u>Si souillures visibles</u> : nettoyer à l'eau et au savon (utiliser un linge doux bien essoré). 4. Rincer avec de l'eau (utiliser un linge doux bien essoré). 5. Essuyer l'équipement en utilisant un linge doux.	Éviter les accidents de type électrique. Respecter les pratiques de base. Respecter les pratiques de base. Éviter la dispersion de liquide à l'intérieur de l'équipement (préserver l'intégrité des composantes internes). Préserver l'intégrité de l'équipement. Préserver l'intégrité de l'équipement.
Désinfection de la « station patient » entre chaque utilisateur 1. S'assurer que la « station patient » est débranchée. 2. Procéder à l'hygiène des mains. 3. Revêtir l'équipement de protection personnelle (blouse, gants, masque, protection oculaire). 4. Désinfecter l'extérieur de la « station patient » en utilisant une lingette pré-humidifiée d'eau de Javel à 0,55% (utiliser une serviette de papier pour enlever l'excédent de solution).	Éviter les accidents de type électrique. Respecter les pratiques de base. Protéger le personnel contre les éclaboussures et assurer la manipulation du produit désinfectant (Chlorox) de façon sécuritaire. Respecter les recommandations du guide du fabricant. Éviter l'introduction de solution désinfectante à l'intérieur de l'appareil.

PROCÉDÉS

5. Laisser sécher.
6. Vérifier l'absence de solution désinfectante à l'eau de Javel sur l'appareil et le filage avant de rebrancher.
7. Essuyer la surface de l'écran tactile avec un linge doux. Assécher les surfaces avec un linge propre et sec.
8. Retirer l'équipement de protection personnelle.
9. Procéder à l'hygiène des mains.

NOTE IMPORTANTE DU FABRICANT :

Ne jamais utiliser un produit désinfectant en vaporisateur pour effectuer la procédure ni immerger l'équipement dans des liquides.

PRINCIPES

Respecter le temps de contact nécessaire à la destruction des microorganismes.

Éviter les accidents de type électrique.

Enlever les résidus de solution désinfectante.

Respecter les pratiques de base.

Respecter les pratiques de base.


Éviter l'introduction de liquide dans les composantes internes de la « station patient » et ainsi préserver l'intégrité de l'appareil.

Références


ASPQ (1999). Guide de prévention des infections : pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de santé. Relevé des maladies transmissibles au Canada. Vol. 25S4

INSPQ (2005). Prévention et contrôle de la diarrhée nosocomiale associée au Clostridium difficile au Québec. Lignes directrices pour les établissements de soins. 3^e édition.

Sand Dune Ventures, Inc. (2009). User's guide : Sahara NetSlate a230T. TabletKiosk Tablet Cleaning Guide.

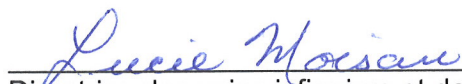

Directrice des soins infirmiers et de la qualité

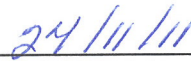

date