
DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires cliniques, conseillères en soins infirmiers, personnel infirmier, gestion de l'approvisionnement.

EXPÉDITEURS : Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers - Évaluation et harmonisation des produits

DATE : Le 18 août 2021

OBJET : **Aide-mémoire pour l'utilisation d'un dispositif ENFIT**

Afin d'éviter certaines problématiques en lien avec l'utilisation d'un dispositif ENFIT, vous trouverez ci-joint, la façon de procéder pour effectuer adéquatement le branchement de la tubulure ou de la seringue au raccord ENFit™

Veuillez prendre note qu'en cas de bris du dispositif, vous pouvez vous procurer l'adaptateur Z8884752042E avec le **GRM 1047256**.



Des seringues ENFIT et des raccords de transition (partie conique) individuels sont disponibles sur les chariots 24 h. **Il à noter que les seringues standards ne sont pas compatibles avec la nouvelle connexion ENFIT.**

Voici la liste du GRM à utiliser

DESCRIPTION	GRM
Seringue entérale-connexion ENFIT Format de 3ml :	1066208
Seringue entérale-connexion ENFIT Format de 12ml :	1066209
Seringue entérale-connexion ENFIT Format de 60ml:	1066210
Raccord de transition	1069615
Adaptateur pour sonde nutrition en Y - 20fr – ENFIT	1047256

Vous trouverez ci-joint un aide-mémoire pour l'utilisation de ce nouveau produit.

Nous vous invitons à diffuser cette information auprès des personnes concernées.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec madame Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers - évaluation et harmonisation des produits à la DSIEU, par courriel à roxane.forgues.ciassmo16@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 617-9154.

Merci de votre collaboration,

RF

Aide-mémoire :

Utilisation d'un dispositif ENFit™

La connexion d'un dispositif ENFit™

Voici la façon de procéder pour effectuer adéquatement le branchement de la tubulure ou de la seringue au raccord ENFit™ :

Avant le branchement :

- Vérifier l'état des connexions:
 - ✓ Dispositif de l'utilisateur
 - ✓ Embout de la seringue
 - ✓ Embout de la tubulure
- Si celles-ci sont souillées, nettoyer les avec de l'eau stérile* ou potable* et une compresse.

* Référez-vous à la méthode de soins informatisée (MSI) du CISSMO accessible sur Intranet : *Irrigation d'un tube entérale*




Exemple de connexion souillée
Attention !!

Lors du branchement :

- Positionner l'embout ENFit™ du dispositif de l'utilisateur face vers le bas afin de **prévenir l'accumulation de préparation entérale dans la cavité.**

N.B. Toute accumulation de préparation dans la cavité risque de cimenter les connexions, nécessiter l'utilisation d'une pince et occasionner le bris de la connexion ENFit™.

- Brancher l'embout de la tubulure ou de la seringue sans forcer. Une **rotation d'un quart de tour** suffit à assurer la sécurité de la connexion.

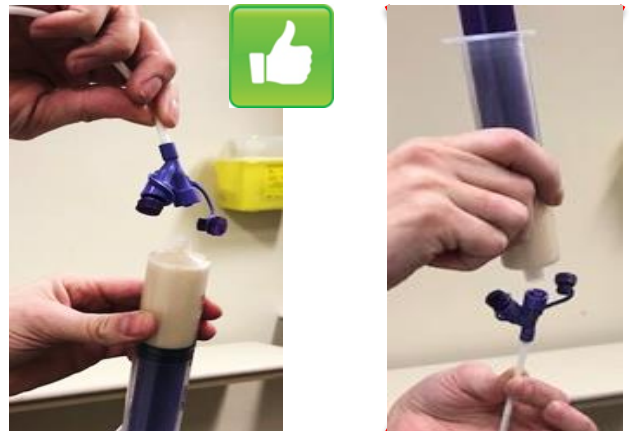

Autre recommandation :

Afin d'optimiser encore plus le système ENFit™, il est recommandé de procéder à l'irrigation du tube d'alimentation entérale **aux 4 heures** ou le cas échéant, **selon la prescription**. Cette action préviendra l'accumulation de préparation entérale, permettra de vérifier l'état des connexions et de les nettoyer au besoin.

