
DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires cliniques, conseillères en soins infirmiers, personnel infirmier, gestion de l'approvisionnement – Hôpital du Suroît et unité d'endoscopie du CMS (ancien CLSC) de Vaudreuil-Dorion
EXPÉDITEUR :	Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers, volet évaluation et harmonisation des produits, DSIEU Yanic Bélanger, chef de service de la gestion contractuelle, DL
DATE :	Le 27 février 2026
OBJET :	Nouveau contrat d'achats regroupés - Matériel de succion 2023-8099

Veillez prendre note qu'un nouveau contrat pour le matériel de succion 2023-8099 est en vigueur depuis le 31 mars 2024. Ce contrat couvre les **contenants de succion murale ainsi que les tubulures associées**.

L'implantation des nouveaux produits de succion murale est prévue les 11 et 12 mars pour :

- Les suctions murales de l'Hôpital du Suroît;
- L'unité d'endoscopie du CMS de Vaudreuil-Dorion.

Le remplacement des contenants se fera en deux étapes, conformément au calendrier d'implantation en annexe. Les changements de produits seront effectués par l'équipe de Cardinal Health et de la conseillère en soins infirmiers, volet évaluation et l'harmonisation des produits. À noter que l'implantation de ces produits est déjà complétée à l'Hôpital Anna-Laberge.

Vous trouverez en annexe la liste complète des contenants de succion accompagnée des codes d'articles et GRM. **Le remplacement du matériel sur les unités sera assuré par les magasiniers le jour même de l'implantation.**

Un lien vers les vidéos de démonstration ainsi que la version électronique des codes QR imagés est également fourni.

Un code QR plastifié illustrant le montage simplifié sera remis aux équipes concernées lors des journées d'implantation.

Nous vous invitons à diffuser cette information aux équipes concernées.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers – Évaluation et harmonisation des produits, DSIEU par courriel à roxane.forgues.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca.

Merci de votre collaboration.

RF, YB

Tableau – Contenants de succion rigides et semi-rigides

Description	Code d'article (fournisseur)	Code GRM	
Sac de succion souple	65651-910C	1124237	
Contenant mural avec valve d'arrêt intégrée (montage mural)	65652-611	1121415	

Calendrier d'implantation-Matériel de succion

Date de changement	UNITÉ /SECTEUR
11 mars 2026	8e A Médecine 7e A Chirurgie 5e A Centre mère-enfant Complexe UHSV Complexe médecine 2e B Médecine 3e B Médecine interne
12 mars 2026	Endoscopie Suroît et Vaudreuil Soins intensifs Urgence S. de réveil Imagerie médicale

Liens Documentation et soutien visuel

Codes QR vidéos de montage Flex - Individuel



Instructions de montage Flex - Individuel

Vidéo Flex - Individuel

Dépannage Flex Avantage

Dispositif d'aspiration Flex Advantage® à un récipient

Mise en marche



1 Sortez la poche de son emballage, puis déployez-la complètement et tournez-la.



2 Insérez la poche dans un récipient Cardinal Health réutilisable de la même taille.



3 Appuyez fermement sur le couvercle pour en vérifier l'étanchéité; vous entendrez un clic.



4 Branchez le tube tressé rouge sur le port d'aspiration marqué VACUUM en poussant et en tournant.



5 Fixez la tubulure du patient dans le port marqué PATIENT.



6 Vérifiez que tous les raccords sont solides et que les capuchons tiennent bien en place.



7 Mettez l'aspiration en marche avec la valve marche-arrêt installée sur le support Flex Advantage® ou le régulateur.

Dispositif d'aspiration Flex Advantage® à un récipient Arrêt



1 Alors que l'aspiration est toujours activée, débranchez la tubulure du port marqué PATIENT et refermez soigneusement le port avec son capuchon.



2 Alors que l'aspiration est toujours activée, débranchez la tubulure tressée rouge du port marqué VACUUM et refermez soigneusement le port avec son capuchon.



3 L'aspiration doit demeurer activée jusqu'à ce que tous les ports aient été bien refermés avec leurs capuchons. **Arrêtez l'aspiration** avec la valve marche-arrêt installée sur le support Flex Advantage® ou le régulateur.



4 Saisissez le rebord du couvercle et retirez la poche en la soulevant. Éliminez-la conformément au protocole de l'hôpital. Ne jetez pas le récipient réutilisable.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le représentant de Cardinal Health Canada ou le Service à la clientèle au : 800.964.5227.

cardinalhealth.com/medivac