



DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires cliniques, conseillères en soins infirmiers, personnel infirmier, gestion de l'approvisionnement
EXPÉDITEUR :	Annie Tu, Conseillère en soins infirmiers, volet évaluation et harmonisation des produits, DSIEU Amélie Fugère, chef de service de la gestion contractuelle, DL
DATE :	Le 12 avril 2024
OBJET :	Nouveau contrat d'achats regroupés - Matériel de succion

Veuillez prendre note qu'un nouveau contrat pour le *MATÉRIEL DE SUCCION 2023-8099* est entré en vigueur le 31 mars 2024. Il concerne autant les contenants de succion que les tubulures associées. Le contrat demeurera en vigueur jusqu'à la fin mars 2027.

Depuis février dernier, plusieurs modifications des produits de succion ont eu lieu à l'hôpital Anna-Laberge dû à des ruptures d'inventaire. L'entrée en vigueur du contrat mentionné ici vient renforcer le virage progressif des produits de succion déjà amorcé dans plusieurs départements. L'implantation complète des nouveaux produits à contrat se fera rapidement pour l'hôpital Anna-Laberge.

Pour l'hôpital du Suroît, les changements quant aux suctions murales se feront dans un deuxième temps. Une note de service à cet effet sera publiée au moment opportun.

En annexe, vous retrouverez les instructions d'utilisation du fournisseur autant pour l'utilisation de la succion simple qu'en tandem. Assurez-vous de bien suivre les étapes de mise en marche et d'arrêt du produit afin d'éviter tout déversement.

Si vous rencontrez des problèmes avec les nouveaux produits, veuillez remplir un formulaire de plainte le plus rapidement possible avec les informations suivantes :

Identification du produit :

1. Le nom du produit
2. Le GRM du produit
3. Le numéro de référence/catalogue du produit
4. Les infos du département et le site
5. Le nom et le numéro de téléphone de la personne contact
6. Le numéro de lot

Nous vous invitons à diffuser cette information auprès des personnes concernées.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse suivante : conseillères_soins_infirmiers.produits.ciassmo16@ssss.gouv.qc.ca.

Merci de votre collaboration.

AT, AF

Dispositif d'aspiration Flex Advantage® à un récipient

Mise en marche



1 Sortez la poche de son emballage, puis déployez-la complètement et tournez-la.



2 Insérez la poche dans un récipient Cardinal Health réutilisable de la même taille.



3 Appuyez fermement sur le couvercle pour en vérifier l'étanchéité; vous entendrez un clic.



4 Branchez le tube tressé rouge sur le port d'aspiration marqué VACUUM en poussant et en tournant.



5 Fixez la tubulure du patient dans le port marqué PATIENT.



6 Vérifiez que tous les raccords sont solides et que les capuchons tiennent bien en place.



7 Mettez l'aspiration en marche avec la valve marche-arrêt installée sur le support Flex Advantage® ou le régulateur.

Dispositif d'aspiration Flex Advantage® à un récipient Arrêt



1 Alors que l'aspiration est toujours activée, débranchez la tubulure du port marqué PATIENT et refermez soigneusement le port avec son capuchon.



2 Alors que l'aspiration est toujours activée, débranchez la tubulure tressée rouge du port marqué VACUUM et refermez soigneusement le port avec son capuchon.



3 L'aspiration doit demeurer activée jusqu'à ce que tous les ports aient été bien refermés avec leurs capuchons. **Arrêtez l'aspiration** avec la valve marche-arrêt installée sur le support Flex Advantage® ou le régulateur.



4 Saisissez le rebord du couvercle et retirez la poche en la soulevant. Éliminez-la conformément au protocole de l'hôpital. Ne jetez pas le récipient réutilisable.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le représentant de Cardinal Health Canada ou le Service à la clientèle au : 800.964.5227.

cardinalhealth.com/medivac

Flex Advantage : Tandem

Instructions d'installation



1 Retirer le sac de son emballage et l'étirer complètement en l'entortillant un peu sur lui-même pour le mettre droit.



2 Insérer le sac dans le réceptacle réutilisable de même grandeur *Cardinal Health*. (ex.: 3000cc)



3 Pressez fermement sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez le "clik!" pour assurer son étanchéité.



4 Brancher le tube rouge rigide dans le port "VACUUM" en poussant avec un mouvement de torsion.



5 Attacher le tube patient au port "PATIENT" sur le premier réceptacle.



6 Insérer l'extrémité mâle du tube tandem dans le port "TANDEM" du premier réceptacle. Assurez-vous que le connecteur soit complètement enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le « clic ».



7 Retirer l'adaptateur bleu en coude du réceptacle suivant. Attacher l'extrémité femelle du tube tandem au port "PATIENT" et pousser fermement pour sceller le tube.



8 Répéter les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que tous les réceptacles soient connectés. Vérifier que le port « TANDEM » du dernier réceptacle est bien fermé avec son bouchon.



9 Mettre l'aspiration en position "ON" en utilisant la valve ON/OFF sur le support rouge sur tous les réceptacles et ouvrir l'aspiration sur le régulateur.

Flex Advantage : Tandem

Processus de fermeture



- 1** Avec l'aspiration toujours ouverte, sur le premier réceptacle débrancher le tube patient du port « PATIENT » et fermer solidement le bouchon.



- 2** Avec l'aspiration toujours ouverte, sur le deuxième réceptacle débrancher l'extrémité femelle du tube tandem du port « PATIENT ». Fermer le bouchon au bout du tube tandem et fermer le bouchon du port « PATIENT » et répéter ces étapes pour chaque réceptacle branché en tandem.



- 3** Avec l'aspiration toujours ouverte, sur le premier réceptacle : Débrancher le tube rouge du port « VACUUM » et fermer solidement le bouchon de ce port. Répétez cette étape pour tous les réceptacles.



- 4** Avec l'aspiration toujours ouverte, quand TOUS les ports sont débranchés et solidement bouchés, **fermez la succion principale** au régulateur. Vous pouvez aussi, au besoin, fermer la succion avec la valve on/off sur le réceptacle.



- 5** Retirer le sac en le soulevant vers le haut par le bord du couvercle. Disposer des sacs pleins selon le protocole de votre hôpital en gardant le tube tandem fixé au couvercle par l'extrémité mâle. Ne pas jeter les réceptacles rigides.