
DESTINATAIRES : À tout le personnel clinique du CISSMO

EXPÉDITEUR : Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers
Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire

DATE : Le 21 août 2020

OBJET : Nouvelle Connexion ENFit®


Afin d'assurer la sécurité des usagers, vous pourriez constater un changement au niveau des connexions de certaines sondes d'alimentation.

Les sondes d'alimentation pourraient être munies d'une connexion ENFit®.

Transition ENFit®

Ancienne connexion

Nouvelle connexion ENFit®

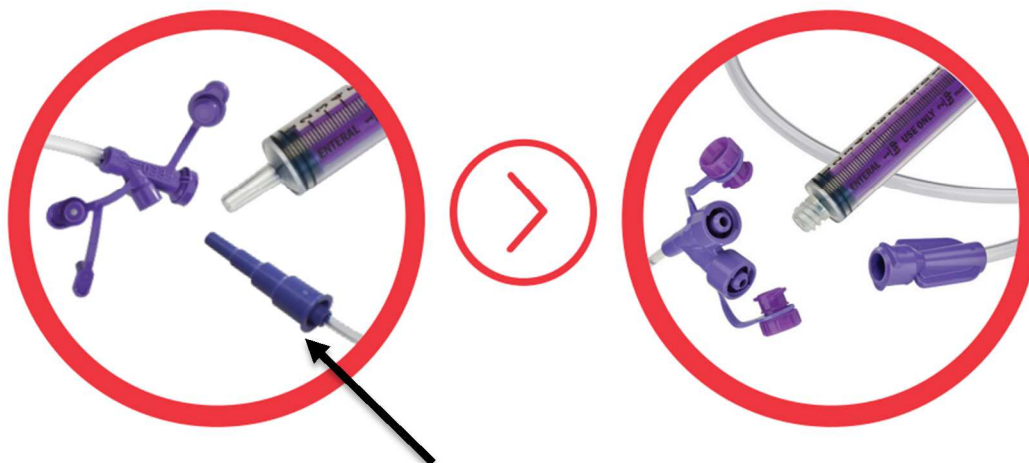

Vous trouverez le nouveau connecteur en dévissant la partie conique de votre tube d'alimentation.

Des seringues ENFit® sont disponibles sur les chariots 24 h. Les codes GRM sont les suivants :

- Format de 3 ml : 1066208
- Format de 12 ml : 1066209
- Format de 60 ml : 1066210

Ci-jointe, vous trouverez une suggestion de la compagnie Cardinal Health du positionnement du raccord ENFit®.

Pour toute question en lien avec cette procédure, veuillez communiquer avec Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers à la DSIEU.

Merci de votre collaboration.

RF



Suggestion de **positionnement** du **raccord ENFit^{MC*}** lors du branchement

Positionner la **sonde d'alimentation vers le bas** lors du branchement peut **prévenir l'accumulation de préparation** dans la cavité.

Toute accumulation **potentielle dans la cavité peut compliquer** le débranchement de la sonde d'alimentation lorsque la préparation a séché

Avertissement :
Ne serrez pas trop le raccord.