

DESTINATAIRES : À tout le personnel clinique des unités d'obstétrique du CISSS de la Montérégie-Ouest

EXPÉDITRICE : Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers - évaluation et harmonisation des produits, DSIEU

DATE : Le 29 septembre 2023

OBJET : Nouvelle Connexion ENFIT - unités des naissances de l'Hôpital Anna-Laberge et de l'Hôpital du Suroît


Afin de contribuer à diminuer la fréquence des problèmes de branchement des tubulures entérales, tous les produits de nutrition entérale seront prochainement dotés de connecteur ENFIT. Les sondes d'alimentation nasogastrique installées dans vos secteurs auront aussi la connexion ENFIT et seront en polyuréthane.

La représentante de Cardinal visitera vos unités dans la semaine du 12 novembre 2023 afin de vous présenter ces nouveaux produits. Les dates de transition et des visites vous seront transmises sous peu.

Transition ENFit®

Ancienne connexion

Nouvelle connexion ENFit®

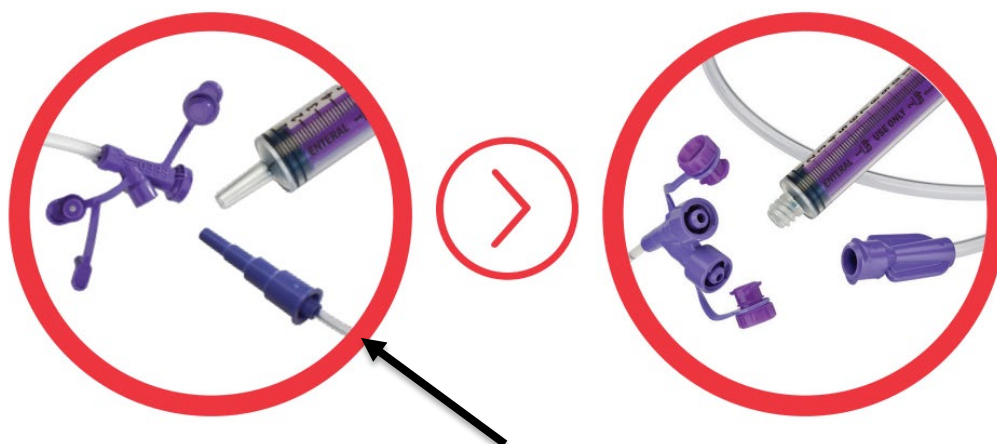

Des seringues ENFIT et ensembles d'extension seront disponibles sur les chariots 24 h. Les seringues avec embouts standards de la compagnie BD ne sont pas compatibles avec la nouvelle connexion ENFIT.

Les seringues et sondes d'alimentation ENFIT remplaceront les produits avec embouts standards, prévoir quelques réserves de sondes d'alimentation et de seringues avec embouts standards pour la période de transition, certains établissements n'ont pas encore terminé le virage ENFIT.

Les GRM sont les suivants :

Format de 3 ml	1066208
Format de 12 ml	1066209
Format de 35 ml	1114684
Format de 60 ml	1066210
Ensemble d'extension 152 cm	1113382

Entretien et changement du matériel relié au tube d'alimentation

Changer la seringue d'alimentation à chaque gavage;
Changer la rallonge à chaque gavage;
Changer le tube d'alimentation (Polyuréthane) q 7 jours;
Changer la seringue d'irrigation ainsi que la bouteille d'eau stérile q 8 h.

Capsule de formation

Une représentante se déplacera dans vos milieux afin d'offrir des capsules de formation sur les produits. La durée de la formation est d'environ 15 minutes.

Horaire des formations avec la représentante :

Pavillon des naissances Hôpital Anna-Laberge

Jour /heure					
14 novembre	7h30-7h45	10h à 10h15	14h à 14h15	14h30 à 14h45	15h à 15h15
15 novembre					


Centre-mère enfant Suroît

Jour /heure				
16 novembre	8h à 8h15	10h à 10h15	14h à 14h15	15h30 à 15h45
17 novembre				

Pour toute question en lien avec ce changement, veuillez communiquer avec Mme Roxanne Forgues, Conseillère en soins infirmiers, direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers (DSIEU).

Merci de votre collaboration.

RF

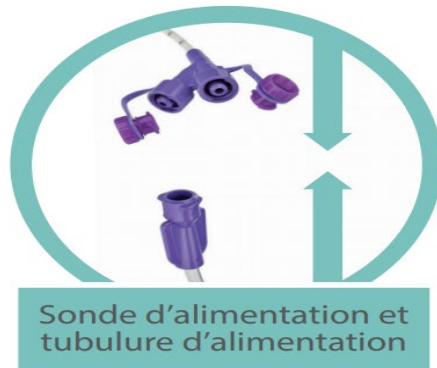

Suggestion de **positionnement** du **raccord ENFit^{MC*}** lors du branchement

Positionner la **sonde d'alimentation vers le bas** lors du branchement peut **prévenir l'accumulation de préparation** dans la cavité.

Toute accumulation **potentielle dans la cavité peut compliquer** le débranchement de la sonde d'alimentation lorsque la préparation a séché

Avertissement :
Ne serrez pas trop le raccord.