
DESTINATAIRES : Tout le personnel infirmier et les médecins

EXPÉDITEUR : Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers – évaluation et harmonisation des produits, DSIEU

DATE : Le 23 septembre 2022

OBJET : **Changement de produit - valve de drainage thoracique Pneumostat (code GRM 1000214) - révision**

Par la présente, nous vous informons que le produit **VALVE DE DRAINAGE THORACIQUE PNEUMOSTAT** de la compagnie Atrium est maintenant discontinué.

Nous recommandons d'utiliser dorénavant la valve P-Eggy de la compagnie REDAX. Cette valve, incluant les adaptateurs compatibles, vous sera livrée automatiquement lors de vos commandes de l'ensemble de drainage thoracique Pneumostat (code GRM 1000214).

PRODUIT DISCONTINUÉ



NOUVEAU PRODUIT





La valve **P-Eggy** est une valve antiretour qui permet l'évacuation de l'air et des liquides par gravité. Voir le guide d'utilisation en annexe.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

RF

UTILISATION VALVE DRAINAGE THORACIQUE P-EGGY

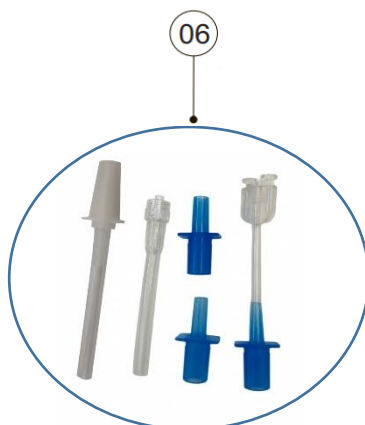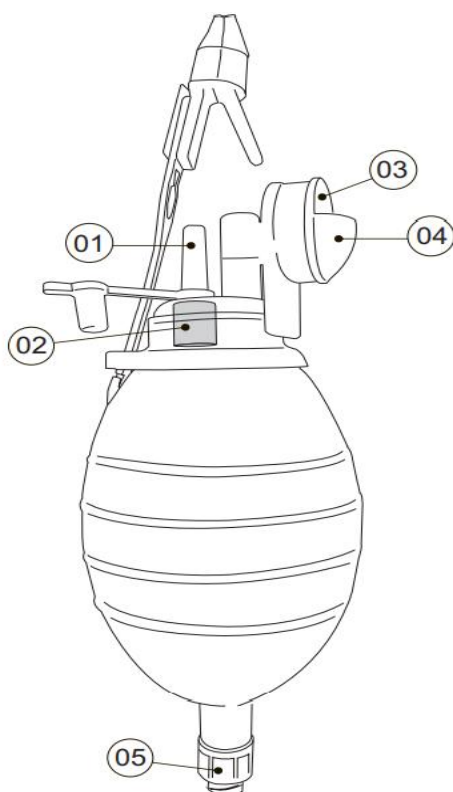

1. Connecteur pour tubulure de drainage
2. Valve anti-reflux (évite reflux des liquides drainés)
3. Valve unidirectionnelle pour l'air
4. Réservoir pour fuites d'air
5. Port de prélèvement sans aiguille pour vidange du réservoir (avec seringue)
6. Adaptateurs disponibles

BRANCHEMENT

- Brancher l'adaptateur sélectionné (6) au connecteur de la valve (1) et brancher au drain par la suite
- Choix de l'adaptateur selon le type de drain installé

VÉRIFICATION FUITES D'AIR

- La fuite d'air du patient peut être confirmée en ajoutant environ 1 ml d'eau dans le réservoir pour fuites d'air (4).
- Videz le réservoir pour fuites d'air après utilisation.

DRAINAGE

- Le dispositif permet le drainage de l'air et des fluides par gravité (drainage libre)
- Il est possible de comprimer le réservoir pour appliquer une aspiration modérée.

**ATTENTION. Une prescription est nécessaire pour appliquer la succion (compression du réservoir).
NE PAS CONFONDRE AVEC LE JACKSON-PRATT**

Si drain installé nécessite irrigation (prescription médicale):
Ajouter un robinet 3 voies au bout de l'adaptateur avant de brancher au drain

