



Note de service

DESTINATAIRES : À tous les utilisateurs du service de biologie médicale du CISSSMO

EXPÉDITEURS : Audrey Ouellet, Chef de service laboratoire
Direction régionale des laboratoires
Laboratoire de l'hôpital Anna-Laberge

Marie-Ève St-Aubin, Chef de service laboratoire
Direction régionale des laboratoires
Laboratoire des hôpitaux Barrie Memorial et du Suroît

DATE : Le 2 juin 2023

OBJET : **Rappel des bonnes pratiques d'emballage des glacières réfrigérées
durant la période estivale**

Avec les températures élevées auxquelles nous devons faire face durant la période estivale, nous en profitons pour vous rappeler les bonnes pratiques d'emballages des glacières réfrigérées :

- Utiliser le bon nombre de blocs réfrigérants congelés selon la grosseur de la glacière;

Format	Nombre minimal de blocs réfrigérants congelés
Petite 8.5 L	3
Moyenne 15 L	6
Grande 26-28 L	8 à 10

- Très important de disposer les blocs réfrigérants congelés également en dessous et au-dessus des échantillons (méthode « sandwich »);
- Privilégier l'utilisation des glacières de petite et de moyenne taille pour le transport des échantillons réfrigérés, utiliser les glacières de grandes tailles pour les échantillons à température pièce.

L'application de ces procédures est essentielle au maintien de la qualité des échantillons et permet d'éviter plusieurs non-conformités et reprises de prélèvement.

Prière de communiquer ces informations aux personnels concernés.

Merci de votre collaboration.