

**CAPSULE
D'INFORMATION
PDSB**



Offrir des soins sur un matelas thérapeutique

Le saviez-vous?¹

- Plusieurs facteurs favorisent la formation de plaie de pression.
- L'utilisation d'un matelas thérapeutique est une stratégie efficace et reconnue pour prévenir et/ou traiter les plaies de pression.
- L'ajout de literie sur un matelas thérapeutique a peu d'effet sur l'efficacité du produit. Donc le matelas reste aussi efficace pour l'usager!



Offrir des soins à un usager couché sur un matelas thérapeutique.

- Mobiliser un usager sur un matelas thérapeutique, est plus exigeant pour les soignants. En effet, la friction du corps est plus importante que sur un matelas régulier.
- **Il est recommandé, le temps des soins, de mettre le matelas thérapeutique en mode « statique ».** Le matelas se gonflera, ce qui facilitera l'exécution des soins.

C'est simple :

- 1- Appuyer sur le bouton « **LOCK/UNLOCK** » 5 secondes environ.
- 2- Appuyer sur le bouton pour changer le mode en « **STATIC** »
- 3- Offrir les soins nécessaires
- 4- Appuyer sur le bouton pour remettre le moteur en mode « **ALTERNATE** »



¹ MSSS. *Guide sur les matelas à réduction de pression*, (2000), 96 pages.