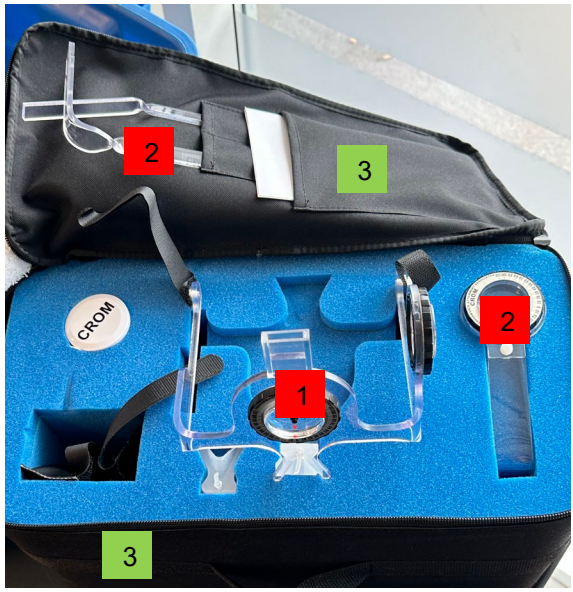


# FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- INSTRUMENT DE MESURE CERVICALE CROM

| MATÉRIEL REQUIS                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gants à usage unique</li> <li>✓ Lingette de nettoyant-désinfectant</li> <li>✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante</li> </ul> |

| SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Procéder à l'hygiène des mains<br/>Mettre des gants propres</p> <p><b>Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'entièreté de l'équipement</li> <li>2. Les outils utilisés</li> </ol> |

| SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION<br>AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS<br>ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Procéder à l'hygiène des mains<br/>Mettre des gants propres</p> <p><b>Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'entièreté de l'équipement</li> <li>2. Les outils utilisés</li> <li>3. L'intérieur et l'extérieur du sac de transport</li> </ol> <p>En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.</p> |

| VISUEL                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FRÉQUENCE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entre les différents usagers</li> <li>- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch &amp; low touch</li> </ul> <p><b>RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)</li> <li>- Les personnes désignées par le gestionnaire</li> </ul> |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| HIGH TOUCH                                                                          | LOW TOUCH                                                                           |