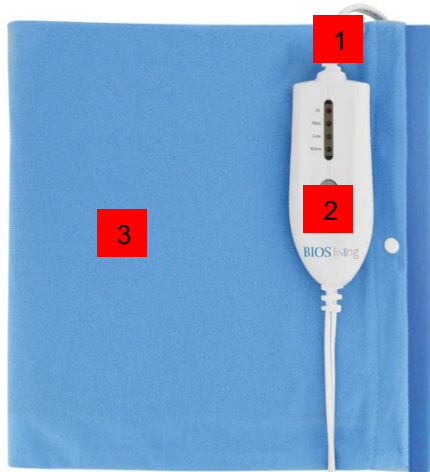


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- COUSSIN CHAUFFANT

MATÉRIEL REQUIS
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Retirer la housse du coussin et le déposer à la machine à laver tel que recommandé par le fabricant. Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le fil conducteur 2. L'appareil et ses boutons 3. Le coussin chauffant en vinyle S'assurer que le coussin est complètement sec avant la prochaine utilisation

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL


FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

	
HIGH TOUCH	LOW TOUCH