


POL-10374-ANNEXE CXIV

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- DÉTECTEUR DE COEUR FOETAL OU DÉBIT SANGUIN (ULTRASON)

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. La tige 2. Le moniteur et les boutons 3. Le fil de la sonde 4. La sonde	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE	
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. La tige 2. Le moniteur et les boutons 3. Le fil de la sonde 4. La sonde 5. Le panier de transport En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.	FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

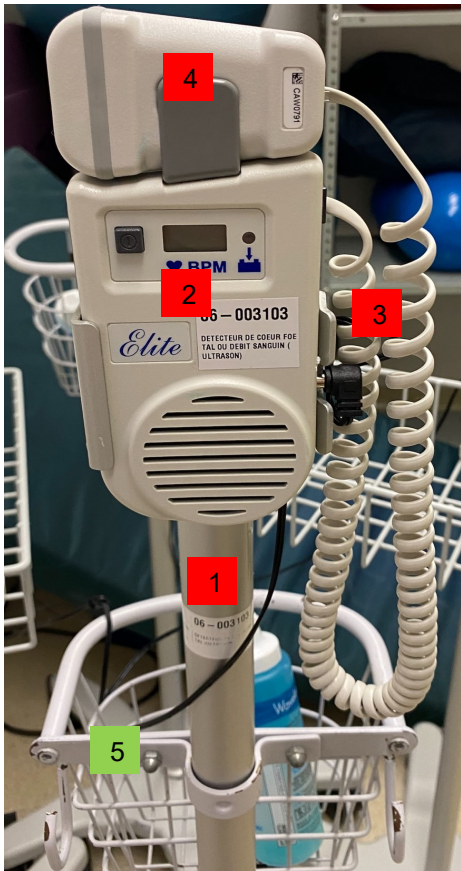

HIGH TOUCH



LOW TOUCH