


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- ÉVALUATION SENSORIELLE PRECISE JAMAR (JAMAR TOUCH-TEST TWO POINT DISCRIMINATOR)

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le dessus et le dessous de la base en plastique 2. Les pointes en aluminium	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE	FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.	FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

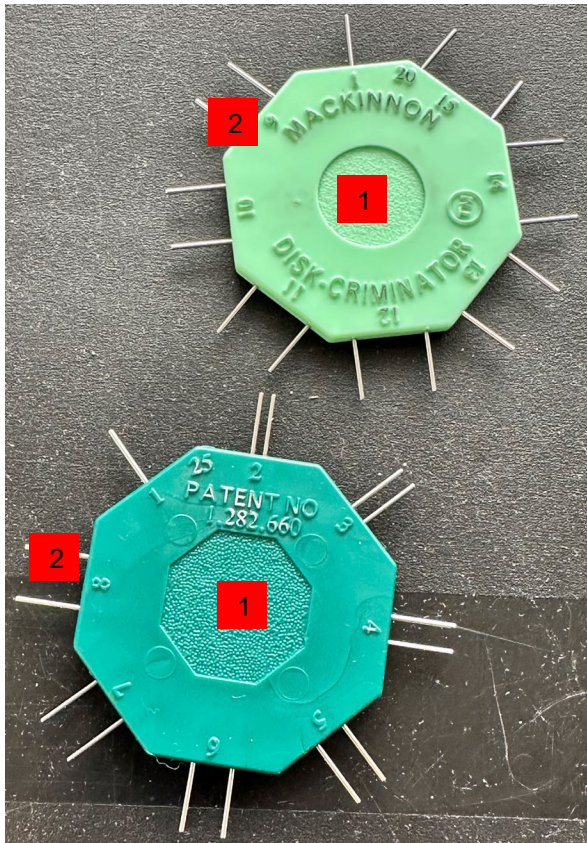

HIGH TOUCH



LOW TOUCH