


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- ACTIVITÉ OU MATÉRIEL DE RENFORCEMENT DES DOIGTS ET DES MAINS

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
Au besoin, s'assurer de l'intégrité du bois, s'il y a lieu, aviser le gestionnaire si l'équipement n'est plus intact. Procéder à l'hygiène des mains. Mettre des gants propres. Désinfectez les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le dessus et le dessous de de l'équipement	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE	
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le dessus et le dessous de de l'équipement 2. Le support de l'équipement En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.	
FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ	
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire	

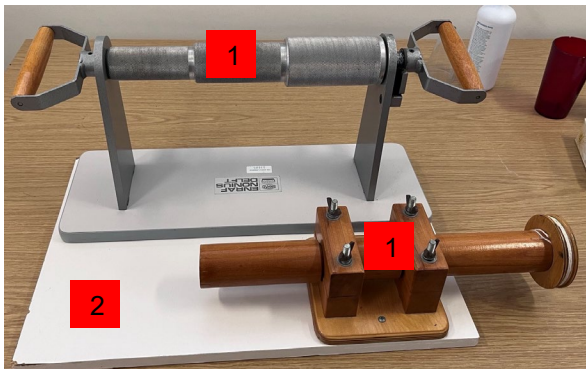

HIGH TOUCH



LOW TOUCH