

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- BIBIBLANKET

MATÉRIEL REQUIS
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Retirer la couverture et la déposer à la lessive, s'il y a lieu Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : Nettoyage de la BilliSorf 1. Nettoyer avec le produit désinfectant et un linge bien ESSORÉ 2. Laisser le produit selon le temps de contact requis 3. Avec un linge sec, polir pour enlever l'excédent du produit. 4. En tout temps, éviter de nettoyer l'appareil avec un linge trop humide Vider l'étui de plastique contenant la Bili Tx 1. Enlever l'enveloppe jetable qui recouvre le panneau de fibres optiques et la jeter 2. Enlever la sacoche de transport de l'illuminateur 3. Laver l'appareil avec une lingette désinfectante et laisser sécher sur le chariot, déposer une serviette propre sur le chariot au préalable Démontage de chaque partie de l'appareil 1. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'étui de plastique 2. Nettoyer les feuilles d'instruction recto-verso et laissez sécher 3. Défaire le cordon d'alimentation électrique, le laver et attacher d'un élastique 4. Nettoyer l'illuminateur, le cordon et la boîte électrique 5. Nettoyer la sacoche de transport, tissu de l'illuminateur et son cordon noir (utiliser un produit qui ne décolore pas le tissu) 6. Nettoyer le panneau de fibres optiques et son tuyau N.B L'appareil Bili Tx doit être bien séché avant de refermer le couvercle	

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE	FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.	FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

	
HIGH TOUCH	LOW TOUCH