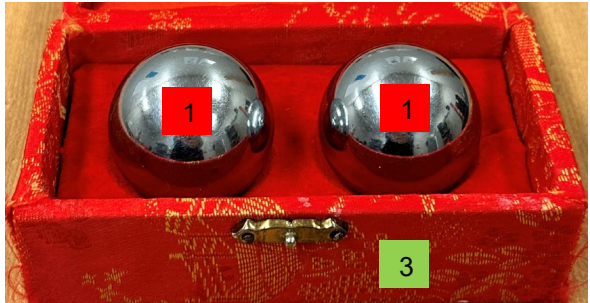


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- BOULES CHINOISES

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
S'assurer de l'intégrité de l'équipement, s'il y a lieu, aviser le gestionnaire si l'équipement n'est plus intact. Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. L'entièreté de l'équipement N.B S'assurer que les boules chinoises soient sèches et que le temps de contact soit respecté avant de les remettre dans leur boîte.	

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

 HIGH TOUCH  LOW TOUCH
--