

Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux			
Direction(s) responsable(s)	Direction générale	Approuvé	2026-02-04
	Choisissez un élément	Révisé	AAAA-MM-JJ
Personne(s) concernée(s)	Tout intervenant qui œuvre au CISSS de la Montérégie-Ouest		
Outils cliniques associés	DIR-10295 Directive de nettoyage et désinfection des équipements thérapeutiques et des objets utilisés lors d'interventions Registre des équipements Affiche – Zone souillée Affiche – Zone propre		

1. Énoncé

La transmission des infections nosocomiales et des bactéries multirésistantes¹ chez les usagers a un impact important sur la qualité des soins. Le retraitement des équipements médicaux est essentiel pour assurer la sécurité des usagers et ainsi diminuer les risques de transmissions nosocomiales. Le nettoyage et la désinfection de bas niveau du matériel non critique destiné aux soins des usagers font partie des pratiques de base. Cette politique s'inscrit dans l'application des lignes directrices de Santé Canada concernant le nettoyage et la désinfection des équipements médicaux et elle vise à répondre aux normes d'Agrément Canada et à diverses recommandations du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS).

2. Champ d'application/Contexte légal

La présente politique s'inscrit dans la loi sur la santé et les services sociaux, chapitre S-4.2, 2023 « 8.1° assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux »;

De plus, il est indiqué dans le cadre de référence du MSSS, 2017 « Des politiques et des procédures claires et concises sont élaborées et maintenues pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation de l'équipement, des appareils et des instruments médicaux réutilisables ».

Depuis avril 2023, il s'agit d'une nouvelle pratique organisationnelle requise (POR) d'Agrément Canada. L'application de cette politique concerne uniquement les équipements médicaux qui entre en contact avec la peau intacte de l'usager.

Tous les efforts doivent être déployés afin de freiner la transmission des infections, notamment par la mise en place de processus et d'outils permettant d'effectuer le nettoyage et la désinfection des équipements médicaux de bas niveau selon la classification de Spaulding.

3. Définitions

Classification de Spaulding : Cette classification répartit les dispositifs médicaux en trois catégories, selon le risque d'infection lié à leur utilisation.

Contamination : Présence de microorganismes pathogènes sur une surface environnementale susceptibles de favoriser la transmission des infections.

Désinfection : Processus utilisé pour réduire le nombre de microorganismes viables sur une surface à un niveau précédemment établi comme approprié pour sa manipulation ou son utilisation.

¹ Infections nosocomiales dans le texte inclus également les bactéries multirésistantes

Désinfection de bas niveau : Processus qui détruit la plupart des bactéries végétatives, certains champignons et certains virus à enveloppe. Elle ne tue pas les mycobactéries ni les spores.

Désinfection de haut niveau : Processus qui détruit les bactéries végétatives, les mycobactéries, les champignons ainsi que les virus à enveloppe (ayant une membrane lipidique) et les virus sans enveloppe (sans membrane lipidique), mais pas nécessairement les spores bactériennes.

Désinfection de niveau intermédiaire : Processus qui détruit les bactéries végétatives, la plupart des virus et la plupart des champignons, mais non les spores bactériennes.

Dispositifs critiques : Dispositifs qui pénètrent la peau ou les tissus stériles.

Dispositifs semi-critiques : Dispositifs qui touchent les muqueuses intactes ou les lésions cutanées sans y pénétrer.

Dispositifs non critiques : Dispositifs qui ne touchent pas l'utilisateur ou seulement sa peau intacte.

Entre-cas : Se dit de la désinfection d'un lieu ou d'un équipement partagé entre deux usagers (ex.: entretien de la douche entre-cas).

Équipement fixe : Tout équipement présent dans une pièce et qui, même s'il est pourvu de roulettes, reste généralement dans cette même pièce.

Équipement médical² : Appareil, dispositif ou matériel médical non invasif utilisé dans le cadre de la prestation de soins et services qui entre en contact avec la peau intacte d'un usager. Il s'agit par exemple : des fauteuils roulants, des stéthoscopes, des potences à perfusion et des commodes.

« **High touch** » : Surfaces à potentiel élevé de contamination avec lesquelles les mains des travailleurs de la santé et des usagers entrent souvent en contact (ex : ridelles de lit, cloches d'appel, barres d'appui, bras de chaise d'aisance, etc.).

« **Low touch** » : Surfaces à faible potentiel de contamination avec lesquelles les mains des travailleurs de la santé et des usagers entrent peu en contact (ex : plafond, plancher, hauteur des murs).

Microorganisme : Bactérie, virus, champignon, parasite, prion ou spore.

Nettoyage : Traitement qui consiste à enlever les souillures et autres matières susceptibles d'héberger des microorganismes et de nuire à l'action d'un germicide.

URDM : Unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Zones grises : Surfaces ou équipements pour lesquels la responsabilité de nettoyage et de désinfection n'est pas clairement définie.

4. Objectifs

- Encadrer et harmoniser le processus de nettoyage et de désinfection de bas niveau des équipements médicaux (non critiques);
- Éliminer le risque de transmission des microorganismes lors du partage des équipements de soins;
- Définir les rôles et responsabilités des équipes reliées au nettoyage et à la désinfection de bas niveau des équipements médicaux fixes, mobiles, spécialisés ou dédiés à un utilisateur.

² Les jouets utilisés dans le cadre de la réadaptation qui entrent en contact avec un usager et qui sont utilisés dans la prestation de soins et services sont considérés comme un équipement médical.

5. Intervenants concernés

La présente politique s'adresse à toute personne qui dispense des soins et services fait usage d'équipements médicaux dans sa prestation de service aux usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest.

6. Rôles et responsabilités

Direction générale de l'établissement

- S'assurer que toute utilisation (achat, location et emprunt) des équipements médicaux est conforme aux exigences des normes canadiennes en la matière;
- S'assurer, lors de l'achat ou de l'emprunt des équipements médicaux que l'établissement de santé soit en mesure de réaliser ou de faire réaliser le nettoyage et la désinfection de ces équipements médicaux conformément au principe de base décrit dans le présent document, de même qu'aux instructions du fabricant;
- Vérifier et approuver les politiques et procédures locales en matière de nettoyage et de désinfection de bas niveau des équipements médicaux;
- Acheminer, s'il y a lieu, la politique en matière de nettoyage et de désinfection de bas niveau au Conseil d'administration d'établissement pour approbation.

Chefs et chefs adjoints de départements médicaux

- Prendre connaissance et appliquer les balises inscrites dans le présent document;
- Collaborer à la validation de la politique de nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux;
- S'assurer de la diffusion du présent document aux personnes concernées ainsi que de l'application des balises qui en découlent.

Direction de la logistique

Achat

- Valider, lors du processus d'achat d'un équipement médical, que l'établissement dispose des appareils et équipements requis pour son retraitement, tel que recommandé par le fabricant;
- Obtenir des fabricants les instructions claires et précises sur l'utilisation et l'entretien des équipements médicaux, de même que sur les modalités de formation s'y rattachant.

Génie biomédical

- Soutenir le ou les gestionnaires concernés par le nettoyage et la désinfection d'un équipement médical en exerçant un rôle d'expertise-conseil, notamment sur l'acquisition et sur le maintien de l'intégrité physique de l'équipement lors du nettoyage et de la désinfection;
- Collaborer à la rédaction des fiches de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux.

Service de prévention et contrôle des infections

- Collaborer à la validation de la politique de nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux non critiques;
- Exercer une fonction-conseil et émettre les recommandations appropriées pour toute ambiguïté soulevée en lien avec le nettoyage et la désinfection de bas niveau et pouvant avoir un impact sur l'incidence des infections nosocomiales;
- Exercer une fonction-conseil lors de l'achat des produits et des équipements médicaux;
- Collaborer à la rédaction des fiches de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux;
- Participer aux suivis des indicateurs par les choix possibles d'audits;
- Produire les rapports des audits effectués et transmettre aux gestionnaires respectifs les résultats.

Service d'hygiène et salubrité

- Collaborer à la validation de la politique de nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux;
- Collaborer à la rédaction des fiches de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux;
- Collaborer à la mise en place d'une grille d'entretien des équipements médicaux;
- Nettoyer et désinfecter certains équipements mobiles selon l'horaire et la fréquence déterminée
 - Se référer aux fiches Nettoyage et désinfection des équipements en annexe;
 - Se référer au formulaire administratif, « Liste d'équipement-Nettoyage et désinfection » pour chaque direction;
- Participer aux suivis des indicateurs par les choix possibles d'audits.

Directions cliniques

- Diffuser la politique au sein de leur direction;
- Appliquer la présente politique au sein de leur direction;
- Chaque direction est responsable de produire une liste d'équipement selon le formulaire administratif, « Liste d'équipement-Nettoyage et désinfection »
- S'assurer de coordonner au besoin le processus de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux;
- S'assurer que lors de nouvel achat d'équipement, une fiche soit écrite et disponible pour les intervenants;
- Diffuser les résultats d'audits auprès des intervenants de leur direction.

Gestionnaire du service utilisateur des équipements médicaux

- S'assurer que l'achat des équipements est réalisé par la direction logistique;
- S'assurer que l'information fournie par le fabricant (ou la direction de la logistique le cas échéant) est disponible quant au nettoyage et à la désinfection de l'équipement;
- S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour des fiches de procédures de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux si non déjà fournie par le fabricant;
- S'assurer de cibler les zones propres et zones souillées avec l'affichage appropriée, disponible en annexe;
- S'assurer d'identifier une fréquence de nettoyage et de désinfection pour chaque équipement avec la collaboration du service d'hygiène et de salubrité et du service PCI;
- S'assurer que le personnel soit en nombre suffisant pour accomplir le nettoyage et la désinfection des équipements médicaux;
- S'assurer que le personnel qui utilise l'équipement médical a reçu la formation adéquate pour le nettoyage et la désinfection de l'équipement médical;
- S'assurer du respect des pratiques de prévention et contrôle des infections, ainsi que de santé et sécurité au travail au sein du service lors du nettoyage et de la désinfection;
- S'assurer de commander les produits désinfectants et les équipements de protection individuelle nécessaire.
- S'assurer que les intervenants ont accès aux fiches de nettoyage et désinfection à proximité;
- Participer aux suivis des indicateurs par des audits d'inspection visuelle tous les premiers lundis du mois, cette tâche peut être délégué à l'intervenant désigné par le gestionnaire.

Intervenants

- Connaître et appliquer la présente politique;
- Suivre la formation sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau;
- Porter les équipements de protection individuelle recommandés, selon la tâche à effectuer;
- Utiliser les produits de nettoyage et de désinfection recommandés selon le type d'équipement;
- Nettoyer et désinfecter l'équipement médical sous sa responsabilité, selon la procédure établie;
 - Se référer aux fiches *Nettoyage et désinfection des équipements* joints en annexe;
 - Se référer au formulaire administratif, « Liste d'équipement-Nettoyage et désinfection » pour chaque direction.
- S'assurer de procéder au nettoyage et à la désinfection des équipements dans une zone appropriée;
- S'assurer d'identifier l'équipement lorsqu'il est nettoyé, selon le système d'identification établi;

- S'assurer d'éviter la contamination croisée entre le souillé et le propre;
- Participer aux suivis des indicateurs par des audits d'inspection visuelle lorsque demandé par le gestionnaire;
- S'assurer de l'intégrité de l'équipement et assurer le suivi auprès de son gestionnaire en cas d'anomalie.

7. Principes directeurs

Selon la classification de Spaulding, cette politique encadre seulement la désinfection de bas niveau pour les équipements médicaux non critiques qui touchent la peau intacte de l'utilisateur. Tous les dispositifs critiques ou semi-critiques doivent suivre un processus de retraitement spécialisé et spécifique. Il est donc important de contacter une URDM dans ces situations.

Il est important de suivre les recommandations du fabricant concernant l'entretien de tous les dispositifs médicaux. De plus, les dispositifs médicaux à usage unique ne doivent pas être nettoyés et désinfectés.

Catégorie	Type de contact	Méthode de retraitement	Agent de retraitement	Contacter URDM
Critique	Tissus stériles	Stérilisation	- Vapeur - Oxyde d'éthylène - Peroxyde d'hydrogène - Ozone - Perozone (peroxone) - Acide péracétique	X
Semi-critique	Muqueuses intactes ou lésions cutanées (peau non intacte)	Désinfection de haut niveau	- Glutaraldéhyde > 2 % - Ortho-phthalaldéhyde 0,55 % - Peroxyde d'hydrogène > 7 % - Peroxyde d'hydrogène accéléré 2 % - Pasteurisation : eau chaude - Désinfection thermique	X
Non critique	Peau intacte ou aucun contact direct	Désinfection de niveau intermédiaire ou bas niveau	- Alcool 70 % - Halogènes - Phénoliques - Peroxyde d'hydrogène - Ammonium quaternaire - Chlore* (<i>Relié au C. Difficile</i>) - Désinfection thermique	

Type d'équipement classé en fonction des soins et des services

Afin de diminuer les risques de transmission nosocomiale, le type d'équipement et la fréquence de nettoyage et de désinfection est identifié dans la fiche associée selon les services.

Fiches de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux

Chaque équipement doit avoir une fiche de nettoyage et de désinfection de bas niveau qui explique les étapes à suivre, y compris le démontage et remontage, s'il y a lieu. Ces fiches sont disponibles facilement au point d'utilisation par exemple dans un cartable, sur intranet et selon les particularités et besoins du milieu.

Principe de base sur le nettoyage et la désinfection des équipements médicaux de bas niveau

- Prévoir un cheminement pour la réception, le nettoyage, la désinfection et l'entreposage de l'équipement qui soit différent pour le matériel souillé et le matériel propre, afin d'éviter la contamination croisée;
- Identifier un endroit pour effectuer le nettoyage et la désinfection des équipements médicaux;
 - Utilité souillée ou un autre endroit identifié par le gestionnaire;
- S'assurer d'avoir les produits pour le nettoyage et la désinfection, disponibles pour effectuer la tâche;
 - Suivre les recommandations du manufacturier et respecter le temps de contact;

Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

- S'assurer que les produits soient entreposés de façon sécuritaire;
- S'assurer d'avoir les équipements de protection individuelle disponibles pour effectuer la tâche;
- Nettoyer les souillures visibles avant de désinfecter et respecter le temps de contact du produit utilisé;
- Identifier un endroit pour entreposer les équipements médicaux propres;
 - Utilité propre ou un autre endroit identifié par le gestionnaire.

Formation

Afin d'assurer la conformité aux pratiques de nettoyage et de désinfection, chaque intervenant qui offre des soins et des services auprès des usagers doit suivre la formation sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau des équipements médicaux non critiques.

La formation ENA#1918 *Nettoyage et désinfection des équipements de soins* est intégrée dans le plan de formation à l'embauche.

Selon le type d'équipement médical, d'autres formations pourraient être disponibles. Vous devez vous référer au gestionnaire du service utilisateur.

Indicateurs

Des indicateurs de suivi doivent être mis en place, afin d'assurer la conformité aux bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection des équipements médicaux.

Un de ces trois indicateurs devrait être fait minimalement, une fois par période idéalement les premiers lundis du mois.

- Audit d'inspection visuelle afin de valider l'entreposage du matériel propre et souillé;
- Audit de désinfection des équipements médicaux par fluorescence (marquage);
- Audit de désinfection des équipements médicaux par test d'adénosine triphosphate (ATP).

Une rétroaction auprès des intervenants doit être effectuée après avoir effectué la compilation et l'analyse des résultats.

8. Annexe(s)

Annexe I	Veste à pression profonde
Annexe II	Veste lestée
Annexe III	Vscan
Annexe IV	Accessoires de positionnement divers
Annexe V	Accessoires de positionnement radiologiques
Annexe VI	Accessoires et équipements pour fauteuil roulant
Annexe VII	Accessoires et équipements pour marchette
Annexe VIII	Accu dose
Annexe IX	Activité de mobilité et renforcement des membres supérieurs
Annexe X	Activité ou Matériel de renforcement des doigts et des mains
Annexe XI	Airvo 2
Annexe XII	Alarme prise de médicaments
Annexe XIII	Alèse de glissement (Piqué)

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe XIV	Appareil à émissions otoacoustiques
Annexe XV	Appareil à succion
Annexe XVI	Appareil acculink (PQDSN)
Annexe XVII	Appareil de Biofeedback
Annexe XVIII	Appareil de courant interférentiel
Annexe XIX	Appareil de dialyse péritonéale
Annexe XX	Appareil de musculation et accessoires
Annexe XXI	Appareil de traction et accessoires
Annexe XXII	Appareil de Ultrasonothérapie
Annexe XXIII	Appareil d'électrothérapie non portatif et accessoires
Annexe XXIV	Appareil d'électrothérapie portatif (stimulation variée)
Annexe XXV	Appareil d'évaluation du volume vésical (BLADDER SCAN)
Annexe XXVI	Appareil Neurogym (Bungee mobility trainer)
Annexe XXVII	Appareil Neurogym (Sit-to-stand trainer)
Annexe XXVIII	Appareil photothérapie
Annexe XXIX	Appareil pour prélèvement (scanneur)
Annexe XXX	Appareils d'imagerie médicale (radiographie, fluoroscopie, échographie, résonnance magnétique, médecine nucléaire, etc.)
Annexe XXXI	Appui antébrachiale
Annexe XXXII	Appui-sécuritaire court Drive cap.300lbsv
Annexe XXXIII	Arbre à anneaux
Annexe XXXIV	Arc pour amplitude articulaire membre supérieur (Rolyan)
Annexe XXXV	Attelles Stevenson pour évaluation
Annexe XXXVI	Baguettes de rééducation sensorielle différente textures (Rolyan)
Annexe XXXVII	Bain de paraffine
Annexe XXXVIII	Bain pédiatrique
Annexe XXXIX	Balance électronique
Annexe XL	Balance levier
Annexe XLI	Balance pédiatrique
Annexe XLII	Ballon lesté
Annexe XLIII	Ballon proprioceptif
Annexe XLIV	Ballons (balles et ballons d'exercices)
Annexe XLV	Bande résistante d'exercice (Theraband + Theratubes)
Annexe XLVI	Barre d'étau au bain
Annexe XLVII	Barre d'appui au lit

Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe XLVIII	Barre d'assistance au lit (canne, escamotable)
Annexe XLIX	Barre plafond-sol
Annexe L	Barre d'appui pour voiture (Handybar)
Annexe LI	Barre d'entraînement lestées
Annexe LII	Barres horizontales de réadaptation
Annexe LIII	Base à bascule et six réglages de tension (Fitter)
Annexe LIV	Bassin de lit
Annexe LV	Bâton d'habillage
Annexe LVI	Bâton de marche (paire)
Annexe LVII	Bâton d'exercices
Annexe LVIII	Batterie d'évaluation et matériel de dextérité fine en ergothérapie
Annexe LIX	Batterie d'évaluation et objets divers en orthophonie
Annexe LX	Béquilles pour évaluation
Annexe LXI	Berceau pédiatrique (pour bébé)
Annexe LXII	Bicyclette stationnaire
Annexe LXIII	Biliblanket
Annexe LXIV	Bilirubinomètre
Annexe LXV	Biodex et accessoires
Annexe LXVI	Bloc à quads
Annexe LXVII	Blocs de pompes à poignée fonctionnelle
Annexe LXVIII	Bol en acier inoxydable
Annexe LXIX	Bodyblade
Annexe LXX	Bottes de nuits cousinées
Annexe LXXI	Bouillotte
Annexe LXXII	Boule au volant
Annexe LXXIII	Boules chinoises
Annexe LXXIV	Boutons réponse + fils
Annexe LXXV	Bracelet anti-fugue SMART + dispositif
Annexe LXXVI	Cannes (simple, tripode, quadripode et bariatrique)
Annexe LXXVII	Capnographie - Ensemble de calibration
Annexe LXXVIII	Ceinture de marche
Annexe LXXIX	Ceinture à bande Moyenne pour LP Station debout, jusqu'à 600 lbs
Annexe LXXX	Ceintures (tous types)
Annexe LXXXI	Ceinture de traction

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe LXXXII	Ceinture sonore Smart
Annexe LXXXIII	Chainette
Annexe LXXXIV	Chaise d'aisance
Annexe LXXXV	Chaise d'entraînement des quadriceps
Annexe LXXXVI	Chaise d'aisance et de douche sur roue
Annexe LXXXVII	Chaise de bain hamac
Annexe LXXXVIII	Chaise de traitement et de salle d'attente
Annexe LXXXIX	Chaise de transfert
Annexe XC	Chaise et banc pivotant coulissant
Annexe XCI	Chaise haute
Annexe XCII	Chaise roulante
Annexe XCIII	Chariot d'épicerie
Annexe XCIV	Chariot de réanimation
Annexe XCV	Chariot pousse/tire (Metron value)
Annexe XCVI	Chausse-pieds (Enfile soulier à manche long)
Annexe XCVII	Chronomètre
Annexe XCVIII	Civière
Annexe XCIX	Civière douche
Annexe C	Civières d'examen d'échographie
Annexe CI	Cloches d'appels (traditionnelles et adaptées)
Annexe CII	Commande manuelle
Annexe CIII	Concentrateur d'oxygène
Annexe CIV	Cônes
Annexe CV	Cordon d'urgence
Annexe CVI	Courroies
Annexe CVII	Coussin auto-souleveur
Annexe CVIII	Coussin chauffant
Annexe CIX	Coussin ROHO
Annexe CX	Coussins
Annexe CXI	Cuisinière
Annexe CXII	Cylindre à gaz médical et débitmètre
Annexe CXIII	Déambulateur
Annexe CXIV	Détecteur de coeur foetal ou débit sanguin (ultrason)
Annexe CXV	Diapason

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe CXVI	Dispositif de compression séquentiel
Annexe CXVII	Disque de transfert
Annexe CXVIII	Drap de glissement
Annexe CXIX	Dynadisque
Annexe CXX	Dynamomètre (JAMAR)
Annexe CXXI	Dynavision
Annexe CXXII	Échelle à corde
Annexe CXXIII	Échelle d'exercice pour les épaules (Climbing board)
Annexe CXXIV	Échelle d'exercice pour les épaules
Annexe CXXV	Échelle doigt-main
Annexe CXXVI	Écouteurs supra-auriculaires
Annexe CXXVII	Écouteurs
Annexe CXXVIII	Électrocardiogramme mobile (ECG)
Annexe CXXIX	Élévateur d'hygiène pour le bain
Annexe CXXX	Elleptique
Annexe CXXXI	Enfile bas
Annexe CXXXII	Enfile-bouton
Annexe CXXXIII	Évaluation motricité fine (Hole Peg Test)
Annexe CXXXIV	Enveloppements chauds + ratines
Annexe CXXXV	Éponge pour l'électrothérapie
Annexe CXXXVI	Équipement de mobilisation non-ferromagnétique dédié à la résonnance magnétique (chaise roulante, marche pied, poteau à soluté, planche de transfert, etc.)
Annexe CXXXVII	Équipement de réadaptation physique avec rampe
Annexe CXXXVIII	Équipement de réadaptation physique sans rampe «step»
Annexe CXXXIX	Ergomètre pour bras et jambe
Annexe CXL	Escabeau
Annexe CXLI	Esthésiomètres de base à deux et trois points
Annexe CXLII	Établi de travail (Rolyan)
Annexe CXLIII	Évaluation sensorielle précise Jamar
Annexe CXLIV	Exerciseur de genou (passif)
Annexe CXLV	Exerciseurs d'épaule à double poulie
Annexe CXLVI	Extension de clignotant
Annexe CXLVII	Extension de pédale
Annexe CXLVIII	Fauteuil à prélèvements
Annexe CXLIX	Fauteuil auto-souleveur

Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe CL	Fauteuil berçant auto bloquant (ajustable)
Annexe CLI	Fauteuil gériatrique
Annexe CLII	Feuilles/cartes plastifiées
Annexe CLIII	Four à micro-ondes
Annexe CLIV	Glucomètre
Annexe CLV	Goniomètre
Annexe CLVI	Guitare à cheveux
Annexe CLVII	Guitare à cheveux sur roulettes mobile
Annexe CLVIII	Harnais de marche
Annexe CLIX	Horloge calendrier
Annexe CLX	Hotte de préparation stérile
Annexe CLXI	Housse de coussins
Annexe CLXII	Hydrocolateur et enveloppements chauds
Annexe CLXIII	Icepack
Annexe CLXIV	Inclinomètre
Annexe CLXV	Injecteur automatique
Annexe CLXVI	Instrument de mesure des cervicales CROM
Annexe CLXVII	Isolette
Annexe CLXVIII	Isolette de transport
Annexe CLXIX	Jeu de poches
Annexe CLXX	Jeux de table
Annexe CLXXI	Jeux pour enfants en audiologie
Annexe CLXXII	Kit de deux boutons presseurs Big Beamer et un Power Link
Annexe CLXXIII	Kit d'extension de clignotant
Annexe CLXXIV	Lampe de poche
Annexe CLXXV	Lampe salle d'accouchement
Annexe CLXXVI	Laser pour biostimulation (physiothérapie)
Annexe CLXXVII	Laser proprioceptif et courroies
Annexe CLXXVIII	Lève-personne mobile électrique
Annexe CLXXIX	Lève-personne sur rail
Annexe CLXXX	Levier pour chaise de bain
Annexe CLXXXI	Lit d'enfants
Annexe CLXXXII	Lit médical (Hôpital)
Annexe CLXXXIII	Lumière intra spéculum sans fil

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe	CLXXXIV	Lunette de frenzal
Annexe	CLXXXV	Lunette de protection
Annexe	CLXXXVI	Machine à glace
Annexe	CLXXXVII	Machine à musculation pour jambes (Shuttle leg press)
Annexe	CLXXXVIII	Manomètre
Annexe	CLXXXIX	Marchette
Annexe	CXC	Marteau réflexe
Annexe	CXCI	Matelas à pression alternative avec pompe
Annexe	CXCII	Matelas de lits
Annexe	CXCIII	Matelas spécialisé
Annexe	CXCIV	Matelas thérapeutique (ex : à air, equimed avantage plus, curatif domus 4, Serene etc)
Annexe	CXCV	Matériel de simulation manutention (caisse de lait, poids, chariots etc)
Annexe	CXCVI	Matériel thérapeutique - dextérité fine
Annexe	CXCVII	Microscope d'examen
Annexe	CXCVIII	Mini extension de pédale de timbre, Mini stamp Menox, extension pédale Menox
Annexe	CXCIX	Mini vibromasseur
Annexe	CC	Miroir à main
Annexe	CCI	Mitaine de contention
Annexe	CCII	Moniteur à signes vitaux
Annexe	CCIII	Moniteur cardiaque
Annexe	CCIV	Moniteur de chute
Annexe	CCV	Moniteur de pression non-invasif (PNI)
Annexe	CCVI	Moniteur défibrillateur Automatique (DEA)
Annexe	CCVII	Moniteur foetal (doppler)
Annexe	CCVIII	Monofilament
Annexe	CCIX	Montre Polar
Annexe	CCX	Moulinet en acier piquant (Baseline Wartenburg)
Annexe	CCXI	Nébuliseur (non chauffant)
Annexe	CCXII	Ordinateur test de freinage
Annexe	CCXIII	Oreillers
Annexe	CCXIV	Orthèse de confort de mains
Annexe	CCXV	Otoscope et ophtalmoscope
Annexe	CCXVI	Otoscope ophtalmoscope mobile
Annexe	CCXVII	Outils pour thérapie de la main (ciseaux, tournevis, pince, etc)

Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe	CCXVIII	Ouvre-pot automatique
Annexe	CCXIX	Oxymètre de pouls du bout des doigts
Annexe	CCXX	Pédalier
Annexe	CCXXI	Pedi-Mate
Annexe	CCXXII	Perles à enfiler
Annexe	CCXXIII	Pèse personne (Position assise)
Annexe	CCXXIV	Pèse personne à ruban
Annexe	CCXXV	Pèse personne standard
Annexe	CCXXVI	Pince à long manche
Annexe	CCXXVII	Pince à papier hygiénique
Annexe	CCXXVIII	Pincemètre
Annexe	CCXXIX	Plan incliné (Rolyan)
Annexe	CCXXX	Planche à roulette pour membre supérieur
Annexe	CCXXXI	Planche à roulettes
Annexe	CCXXXII	Planche d'équilibre et de proprioception
Annexe	CCXXXIII	Planche de bain
Annexe	CCXXXIV	Planche de transfert et de réanimation
Annexe	CCXXXV	Plaque de gel
Annexe	CCXXXVI	Plateau avec rouleaux velcro
Annexe	CCXXXVII	Plateau de marchette continent globe
Annexe	CCXXXVIII	Plateaux de compression et autres accessoires de mammographie
Annexe	CCXXXIX	Pocket talker
Annexe	CCXL	Poids de cheville
Annexe	CCXLI	Poids libres
Annexe	CCXLII	Pompe à cicatrice
Annexe	CCXLIII	Pompe à gavage
Annexe	CCXLIV	Pompe à perfusion (cassette)
Annexe	CCXLV	Pompe Kangourou (gavage soins)
Annexe	CCXLVI	Pompe saphire épidurale
Annexe	CCXLVII	Pompes à soluté, à narcotique, à hyperalimentation et gavage (2e)
Annexe	CCXLVIII	Pompes à succion portative
Annexe	CCXLIX	Poteau plafond-plancher
Annexe	CCL	Pousse seringue
Annexe	CCLI	Poussette

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe	CCLII	Poutre d'équilibre
Annexe	CCLIII	Pro-sup 5215 (wrist twist)
Annexe	CCLIV	Protecteurs de lit
Annexe	CCLV	Protège ridelles
Annexe	CCLVI	Rallonge de sangle, toile de trsf
Annexe	CCLVII	Rampe d'accès amovible
Annexe	CCLVIII	Rampe de douche
Annexe	CCLIX	Raquettes
Annexe	CCLX	Réfrigérateur
Annexe	CCLXI	Règleur de ceinture de sécurité
Annexe	CCLXII	Rouleaux de massage
Annexe	CCLXIII	Rouleaux et biseaux de positionnement
Annexe	CCLXIV	Ruban à mesurer
Annexe	CCLXV	Sac à pochettes pour les équipements de protection individuelles
Annexe	CCLXVI	Sangles d'isolement
Annexe	CCLXVII	Saturomètre portable (Moniteur SPO2)
Annexe	CCLXVIII	Saturomètre sur roulettes (2e)
Annexe	CCLXIX	Sceau à 2 compartiments gris
Annexe	CCLXX	Séparateur de genoux en vinyl
Annexe	CCLXXI	Shuttle
Annexe	CCLXXII	Siège d'automobile
Annexe	CCLXXIII	Siège de douche (avec ou sans appuie-bras)
Annexe	CCLXXIV	Siège de toilette surélevé
Annexe	CCLXXV	Socle à boule
Annexe	CCLXXVI	Sonde Immitancemètre / EOA
Annexe	CCLXXVII	Soulève jambe
Annexe	CCLXXVIII	Sphygmomanomètre électronique mobile (Appareil à pression artérielle (Tensiomètre))
Annexe	CCLXXIX	Sphygmomanomètre manuel mobile (Appareil à pression artérielle (Tensiomètre))
Annexe	CCLXXX	Spirométrie (voir embout)
Annexe	CCLXXXI	Stablette (2e)
Annexe	CCLXXXII	Stabilisateur de pression bio feedback (Pressure Bio Feedback)
Annexe	CCLXXXIII	Station d'activité thérapeutique (Valpar)
Annexe	CCLXXXIV	Station de travail multifonctionnelle
Annexe	CCLXXXV	Stéthoscope

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe	CCLXXXVI	Stimulateur neuromusculaire et électrodes non adhésives – TENS
Annexe	CCLXXXVII	Support à angle bleu pour activité (Rolyan easel)
Annexe	CCLXXXVIII	Support à épingle
Annexe	CCLXXXIX	Support à poche de lingerie souillée
Annexe	CCXC	Support de douche ventouse MCL
Annexe	CCXCI	Surmatelas
Annexe	CCXCII	Système de compression séquentielle
Annexe	CCXCIII	Système de glissement unidirectionnelle
Annexe	CCXCIV	Table à langer et coussin
Annexe	CCXCV	Table à station debout ajustable
Annexe	CCXCVI	Table d'examen
Annexe	CCXCVII	Table de traitement (réadaptation)
Annexe	CCXCVIII	Table de transport
Annexe	CCXCIX	Table Mayo
Annexe	CCC	Table mobile
Annexe	CCCI	Tables d'examen radiologiques
Annexe	CCCII	Tablette numérique (IPAD)
Annexe	CCCIII	Tabliers et caches plombés dédiés au personnel et/ou usagers
Annexe	CCCIV	Tabouret / petit banc / Marche-pied
Annexe	CCCV	Talonnrière
Annexe	CCCVI	Tapis d'exercice
Annexe	CCCVII	Tapis de bain aquasence MCL
Annexe	CCCVIII	Tapis de chute
Annexe	CCCIX	Tapis de chute sonore (SMART)
Annexe	CCCX	Tapis roulant d'entraînement
Annexe	CCCXI	Téléphone
Annexe	CCCXII	Test coordination œil-main et de la motricité fine (Perdue PegBoard)
Annexe	CCCXIII	Test de boîte et de bloc (Box & Block Test)
Annexe	CCCXIV	Test de dextérité manuelle Minnesota
Annexe	CCCXV	Test de sensibilité chaud/froid
Annexe	CCCXVI	Testeur de temps de réaction de freinage (Reaction break timer)
Annexe	CCCXVII	Têtière
Annexe	CCCXVIII	Thermomètre et boîtier mural
Annexe	CCCXIX	Thermomètre tympanique

Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Politique clinique – Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux

Annexe	CCCXX	Thermomètres portatifs (avec sondes buccales ou rectales et frontal)
Annexe	CCCXXI	Tige à soluté
Annexe	CCCXXII	Tire-lait électrique
Annexe	CCCXXIII	Toile lève-personne (tous types de grandeur, hamac, double cuissarde, quick-fit)
Annexe	CCCXXIV	Toise
Annexe	CCCXXV	Trampoline
Annexe	CCCXXVI	Trapèze pour lits et supports
Annexe	CCCXXVII	Trois bras pour volant (Tri-Pin)
Annexe	CCCXXVIII	Turbine hydrothérapie
Annexe	CCCXXIX	Urinal
Annexe	CCCXXX	Vaisselle adaptés
Annexe	CCCXXXI	VALPAR
Annexe	CCCXXXII	Ventilateur
Annexe	CCCXXXIII	Ventilateur à pression positive continue (CPAP) et biphasique non évasif (BiPAP)
Annexe	CCCXXXIV	Vericom, VC3000, (breaking test computer)
Annexe	CCCXXXV	Verticalisateur

9. Références

- Agrément Canada, 2023. Pratiques organisationnelles requises Livret 2023- Séquence 1, Cycle 2 (2023-2027).
- AHSS, 2011. Procédure de nettoyage et de désinfection des zones grises.
- CISSS de la Côte Nord, 2019. Nettoyage et désinfection des équipements de soins.
- CISSS de la Montérégie-Est, 2019. Partage des responsabilités face à l'hygiène et salubrité de l'environnement, du mobilier et des équipements.
- Groupe santé Nadon, 2018. Nettoyage et désinfection des équipements de soins médicaux.
- INSPQ, 2024. Retraitement des dispositifs médicaux critiques. Repéré à https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1873_retraitement_dispositifs_medicaux.pdf
- MSSS, 2017. Prévention des infections nosocomiales- Cadre de référence à l'intention des établissements de santé et de services sociaux du Québec. Repéré à <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001209/>
- MSSS, 2008. Les zones grises processus d'attribution des responsabilités. Repéré à <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000952/>
- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2023. Loi sur la santé et les services sociaux. Repéré à <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-4.2>
- Ministère de la santé et des services sociaux. (2011). Répertoire des guides de planification immobilière. Unité de retraitement des dispositifs médicaux (unité de stérilisation). Récupéré à <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-610-03W.pdf>
- Santé Canada, 2016. Pratiques de Base et Précautions additionnelles visant à prévenir la Transmission des Infections dans les Milieux de Soins. Repéré à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/pratiques-de-base-precautions-infections-aux-soins-de-sante.html>

Processus d'élaboration		
Rédigé par	Brigitte Duquette, Chef de service prévention et contrôle des infections, milieux hors hospitaliers	2023-11-23
	Joanie Carrier, Conseillère cadre, service de prévention et contrôle des infections Secteurs Suroît – Vaudreuil-Soulanges - Jardins-Roussillon - Haut Saint-Laurent	2025-01-24
Consultation(s)	Chantal Bélisle, conseillère en PCI secteur Jardin-Roussillon	2023-11-29 2025-01-21
	Marie-Hélène Collette, conseillère en PCI secteur Barrie-Memorial	2023-12-05 2025-01-30
	Geneviève Lafleur, conseillère en PCI secteur hors hospitalier	2023-12-05
	Marie-Ève Roy, Chef de programme par intérim – programmes spécialisés DM et DL 7 ans et plus - Territoire Vaudreuil et unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) – Vaudreuil Direction des programmes déficiences	2024-01-10
	Ysabelle Marleau, Directrice adjointe des programmes DI-TSA et DP, Direction des programmes déficiences	2025-11-28
	Caroline Blais, Coordinatrice des programmes spécialisés de réadaptation externe en déficience physique, Direction des programmes déficiences	2025-12-02
	Émilie Bouchard, Adjointe à la directrice des services de soutien à domicile et de la gériatrie	2024-01-08
	Sarah Prud'homme, Adjointe au directeur, par intérim Direction des programmes Santé mentale et Dépendance	2024-01-10 2025-01-31
	Carole Ducharme, Adjointe à la directrice par intérim Direction des services d'hébergement pour les aînés et les personnes en perte d'autonomie (DSHAPPA)	2024-01-10
	Jonathan Clouâtre, chef de service hygiène et salubrité, secteur Jardin-Roussillon	2024-01-10
	Isabelle Demers, chef de service hygiène et salubrité, secteur Suroît et Haut Saint-Laurent, Direction des services techniques	2024-01-10
	Mathieu Ricard, coordonnateur hygiène et salubrité et gestion des déchets biomédicaux, Direction des services techniques	2024-01-10
	Julie Vendette, Agente de planification, de programmation et de recherche à l'Équipe vigie, Direction des services de soutien à domicile et de la gériatrie (DSSADG)	2025-01-28
	Natacha Bernier, Adjointe à la Direction des services d'hébergement pour les aînés et les personnes en perte d'autonomie (DSHAPPA)	2025-01-27
	Olivier Chabot, chef de l'unité de médecine pédiatrique du 3 ^e et de l'unité de débordement (Suroît)	2024-01-10
	Amaya Torres, Acheteuse	2024-01-10
	Feriel Hassoun, Hygiéniste du travail	2024-01-10
	Emmanuelle Richard, Adjointe au directeur général adjoint des programmes de santé physique générale et spécialisée, d'hébergement et de soutien à l'autonomie des personnes âgées (DGAPGSPA)- Service de prévention et contrôle des infections	2025-01-13
	Marie-Pier Séguin, agente de planification, de programmation et de recherche, service PCI hors hospitalier	2025-01-13
	Christelle Robert, Conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers, volet soins critiques (DSIEU)	2025-08-26
	Annie Marceau, Conseillère-cadre, service de prévention et contrôle des infections Secteurs Jardins-Roussillon - Haut Saint-Laurent	2024-01-22
	Karine Cervera, Chef de service- réadaptation (mission hospitalière et cliniques externes)	2024-02-02 2025-01-27
	Jonathan Primeau, Chef d'unité des soins infirmiers- Suppléance rénale (Centres de Châteauguay)	2024-02-02

Historique du document		
Approuvé par	Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	2025-11-17
	Comité de concertation des directeurs adjoints (CCDA)	2026-01-07
	Comité de direction (CODIR)	2026-01-27
	Comité exécutif de gouvernance	2026-01-30
Adopté par	 Dominique Pilon, président-directeur général	2026-02-04
Commentaires	Exceptionnellement l'ajout d'annexes concernant l'entretien des équipements médicaux sera évolutif et considéré comme étant des modifications mineures.	