

Utilisation :

- Immobiliser le genou en extension.
- Installer dans les cas post opératoire ou en remplacement de plâtre post fracture.

Spécification :

- Ajuster à la jambe du patient à l'aide de sangles à velcro.

Installation :

1. Positionner l'attelle en position couchée autour de la jambe en plaçant la rotule dans le trou.
2. Rabattre les velcros autour de la jambe.
3. Ajuster les sangles pour un maintien optimal.

Entretien :

- Retirer l'attelle.
- Détacher les velcros.
- Nettoyer avec un linge humide avec un savon doux.
- Rincer à l'eau.
- Laisser sécher à l'air libre.
- Fréquence : 1 fois par semaine et au besoin



Références : 2026, Médecins, orthèse genou, https://centreorthopediquejl.com/produit/orthese-immobilisation-genou/ , https://oprivesud.com/sherbooke/produit/orthese-dimmobilisation-du-genou-de-type-zimmer/			
Outils cliniques associés :		Entrée en vigueur :	2026-09-01
Rédigé par : Brigitte Duquette	Approuvé par : Stéphanie Racine	Révision :	
PRC-DSSADG-10017 (2026-09)	Direction émettrice : Direction des services de soutien à domicile et gériatrie		