

Utilisation :

- Stabilise la cheville et permet une démarche normale et sécuritaire.
- Recommandé dans les cas neuropathique ou orthopédique tel que :
 - Pied tombant
 - Séquelles AVC
 - Sclérose en plaques
 - Instabilité cheville
 - Fracture ou ostéo-arthrite de la cheville

Spécification :

- Mettre avant le lever et retirer au coucher.
- Mettre idéalement avec des chaussures orthopédiques adaptées.

Installation :

1. Laisser l'orthèse dans le soulier.
2. Enfiler le soulier.
3. Attacher la courroie au niveau du tibia.



Entretien :

- Laver avec un linge ou une débarbouillette imbibée d'eau tiède et d'un savon doux.
- Frotter délicatement l'ensemble du plastique et des mousses.
- Rincer avec un linge propre légèrement humide pour enlever les résidus de savon afin d'éviter les irritations cutanées.
- Fréquence : Minimalement 1 fois par semaine.

Références : 2026. EVO laboratoire, orthèse tibio pédieuse, https://equilibre.net/actualites/orth%C3%A8se-tibiale-pour-le-pied-tombant			
Outils cliniques associés :		Entrée en vigueur :	2026-09-01
Rédigé par : Brigitte Duquette	Approuvé par : Stéphanie Racine	Révision :	
PRC-DSSADG-10019 (2026-09)	Direction émettrice : Direction des services de soutien à domicile et gériatrie		