

Utilisation :

- En cas de fracture lombaire, dorsale ou costale, de stabilisation post opératoire, de maladies dégénératives et sténose canal rachidien.
- Limiter tous les mouvements du tronc.

Spécification :

- Le corset peut être souple, semi-rigide ou rigide.

Installation :

1. Mettre un chandail ajusté sous le corset et mettre un pantalon lousse pour pouvoir l'embarquer sur le corset.
2. Couché sur le côté, glisser la partie postérieure entre le matelas et la personne. Bien caller le corset contre le dos et les hanches. Le bas du corset devrait arriver au bas de la colonne au niveau du sacrum. L'encoche du bas devrait arriver sur les crêtes iliaques.
3. Tourner la personne sur le dos et mettre la partie antérieure du corset sur la partie postérieure à la même hauteur que celle-ci.
4. Accrocher les sangles sans les serrer.
5. Serrer symétriquement les sangles en commençant par le bas.

Entretien :

- Retirer le corset lors de la douche, si permis par le professionnel.
- Nettoyer l'intérieur en mousse et l'extérieur rigide du corset avec un linge, de l'eau et du savon, puis rincez avec un linge humide.
- Sécher à l'air libre, environ 30 minutes.
- Fréquence : une fois par semaine.



Références : https://www.chudequebec.ca/getmedia/bc6dfb3-6690-4f52-91e6-c99c23374c3b/823_05_009_Corset_moule_TL_SO_ortho_PDF.aspx			
Outils cliniques associés :		Entrée en vigueur :	2026-09-01
Rédigé par : Brigitte Duquette	Approuvé par : Stéphanie Racine	Révision :	
PRC-DSSADG-10021 (2026-09)	Direction émettrice : Direction des services de soutien à domicile et gériatrie		