

## Utilisation :

- Sert à immobiliser le bras en cas de fracture de l'épaule, d'entorse ou de blessure musculaire.
- Peut supporter un plâtre au coude ou un bras hémiplégique.

## Spécification :

- Peut être retiré pour la nuit selon les recommandations du médecin.

## Installation :

- Placer le coude dans le coin de l'écharpe.
- Enrouler la sangle sur le cou du côté opposé et la fixer à l'avant de la sangle.
- Ajuster la longueur de la sangle pour soutenir le bras afin de maintenir le coude en flexion à 90°.

## Entretien :

- Laver à la machine à l'eau froide et avec un savon doux.
- Suspendre pour sécher.
- S'assurer que l'usager garde le bras immobilisé durant cette période.
- Fréquence : 1 fois par semaine ou au besoin



Références : <https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/blessures-empoisonnement/comment-immobiliser-un-membre-sup%C3%A9rieur/comment-appliquer-une-attelle-longue-de-bras>, [https://www.chudequebec.ca/getmedia/0e208988-7753-4af0-8bc7-9410305d6c38/823\\_05\\_001\\_attelle\\_thoraco-brachiale.aspx](https://www.chudequebec.ca/getmedia/0e208988-7753-4af0-8bc7-9410305d6c38/823_05_001_attelle_thoraco-brachiale.aspx)

|                                |                                                                                 |                     |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Outils cliniques associés :    |                                                                                 | Entrée en vigueur : | 2026-09-01 |
| Rédigé par : Brigitte Duquette | Approuvé par : Stéphanie Racine                                                 | Révision :          |            |
| PRC-DSSADG-10026 (2026-09)     | Direction émettrice : Direction des services de soutien à domicile et gériatrie |                     |            |