

Utilisation :

- Stabilisation du pouce, de la main ou du poignet à la suite d'une blessure (syndrome canal carpien, entorse, fracture...).
- Limite les mouvements.

Spécification :

- L'orthèse est ajustable et modifiable pour un meilleur confort. Elle peut être remoulée et personnalisée. Remplace un plâtre.

Installation :

1. Positionner le pouce et la main dans l'orthèse.
2. Pousser sur le bouton BOA et tirer sur la languette pour égaliser les fils.
3. Tourner le bouton BOA dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Le bouton BOA doit être en position verrouillée lorsque l'attelle est portée.



Entretien :

- Desserrer complètement : Soulever le bouton BOA et tirer sur la languette pour détendre les fils au maximum. Retirer l'orthèse du poignet.
- Détacher les parties : Si le modèle (comme les orthèses Exos) possède une doublure amovible, retirez-la. Fermer toutes les bandes Velcro pour éviter qu'elles n'accrochent le tissu pendant le lavage.
- Laver à la main avec de l'eau froide ou tiède et du savon doux.
- Nettoyage du mécanisme BOA : Nettoyer les parties rigides et le cadran BOA simplement avec un linge humide et du savon doux.
- Éviter de tremper le mécanisme directement dans l'eau.
- Laisser sécher le tout à l'air libre sur une surface plate.
- Fréquence : minimalement une fois par semaine

Références : 2026, EVO laboratoire, orthèse Exo, recommandation spécifique			
Outils cliniques associés :		Entrée en vigueur :	2026-09-01
Rédigé par : Brigitte Duquette	Approuvé par : Stéphanie Racine	Révision :	
PRC-DSSADG-10027 (2026-09)	Direction émettrice : Direction des services de soutien à domicile et gériatrie		