

GRILLE D'AUDIT SUR LE RETRAITEMENT DES SONDE ETO

Date de l'audit :

Établissement :

Secteur de l'audit :

Cocher dans la case appropriée le niveau de résultat soit :

- | | |
|----------------------------------|--|
| Élément observé : | Indique que la réponse satisfait aux exigences de la norme ou de l'avis d'expert ou encore qu'il n'y a pas d'écart de constaté. |
| Élément observé partiel : | Indique que la réponse ne satisfait que partiellement aux exigences de la norme ou de l'avis d'expert ou encore qu'il y a des écarts de constatés. |
| Élément non observé : | Indique que la réponse ne satisfait pas aux exigences de la norme ou de l'avis d'expert |
| N/A : | Non applicable. |

ACTIVITÉ DE BASE	ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ	ÉLÉMENT OBSERVÉ	ÉLÉMENT OBSERVÉ PARTIEL	ÉLÉMENT NON OBSERVÉ	N/A	COMMENTAIRES
1. PRÉ-NETTOYAGE	1.1 Mettre des gants non-stériles;	☐	☐	☐	☐	
	1.2 Retirer la gaine en place;	☐	☐	☐	☐	
	1.3 Essuyer la surface extérieure de la sonde ETO;	☐	☐	☐	☐	
	1.4 Utiliser un linge propre, doux et non pelucheux;	☐	☐	☐	☐	
	1.5 Placer la sonde ETO dans un contenant fermé et réservé à cet effet;	☐	☐	☐	☐	
	1.6 Transporter le contenant et la sonde ETO dans la zone de retraitement;	☐	☐	☐	☐	
	1.7 Nettoyer/désinfecter le contenant après usage.	☐	☐	☐	☐	
2. TEST DE MORSURE	2.1 Mettre du NaCl 0,9% dans le bac de transport souillé;	☐	☐	☐	☐	Mettre les ÉPI
	2.2 Installer le détecteur de morsure;	☐	☐	☐	☐	
	2.3 Faire l'immersion de la sonde ETO à 40 cm dans l'eau saline (NaCl 0,9%);	☐	☐	☐	☐	
	2.4 Effectuer le test de morsure, selon la procédure;	☐	☐	☐	☐	
	2.5 S'assurer du résultat « pass » du test avant le nettoyage;	☐	☐	☐	☐	
	2.6 Diriger la sonde ETO en réparation si test « fail ».	☐	☐	☐	☐	Avec la chef de l'imagerie médicale

ACTIVITÉ DE BASE	ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ	ÉLÉMENT OBSERVÉ	ÉLÉMENT OBSERVÉ PARTIEL	ÉLÉMENT NON OBSERVÉ	N/A	COMMENTAIRES
3. NETTOYAGE	3.1 Vider le bac d'eau saline et nettoyer avec un lingette appropriée (type <i>Accel TB</i>);	☐	☐	☐	☐	
	3.2 Rincer la sonde sous l'eau pour 1 minute chronométrée, mais sans immerger la poignée, le câble ou le connecteur à l'évier;	☐	☐	☐	☐	
	3.2 Préparer une solution détergente fraîche, selon le guide du fabricant;	☐	☐	☐	☐	
	3.3 Préparer 3 linges propres, secs et non pelucheux (1 à l'eau essoré, 1 avec enzyme et essoré, et 1 dans l'évier);	☐	☐	☐	☐	
	3.4 Utiliser un linge propre, doux et non pelucheux essoré d'enzyme pour nettoyer, en partant du connecteur (éviter les broches du connecteur), en continuant sur le câble jusqu'à la poignée (incluse);	☐	☐	☐	☐	
	3.5 Utiliser un linge propre, doux et non pelucheux essoré d'eau pour nettoyer, en partant du connecteur (éviter les broches du connecteur), en continuant sur le câble jusqu'à la poignée (incluse);	☐	☐	☐	☐	
	3.6 Nettoyer la surface extérieure de la sonde ETO avec le linge dans l'évier;	☐	☐	☐	☐	
	3.7 Vider l'évier après le nettoyage.	☐	☐	☐	☐	
4. RINÇAGE INITIAL	4.1 Rincer à nouveau l'endoscope à l'eau courante tiède afin de retirer tout résidu. Le rinçage doit durer 1 minute chronométrée;	☐	☐	☐	☐	Changer les Gants
	4.2 Essuyer la sonde ETO avec un linge sec propre, doux et non pelucheux.	☐	☐	☐	☐	

ACTIVITÉ DE BASE	ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ	ÉLÉMENT OBSERVÉ	ÉLÉMENT OBSERVÉ PARTIEL	ÉLÉMENT NON OBSERVÉ	N/A	COMMENTAIRES
5. DÉSINFECTION	Désinfection manuelle ou non automatisée :					
	5.1 Utiliser un contenant compatible avec la solution;	☐	☐	☐	☐	
	5.2 S'assurer de la dimension adéquate du contenant;	☐	☐	☐	☐	
	5.3 S'assurer que la solution désinfectante a été vérifiée (CME);	☐	☐	☐	☐	Test de bandelette
	5.4 Immerger à 40 cm la sonde ETO dans la solution;	☐	☐	☐	☐	
	5.5 Chronométrer pour 5 minutes.	☐	☐	☐	☐	
6. RINÇAGE FINAL	Rinçage final manuel ou non automatisé :					
	6.1 Utiliser une méthode aseptique pour le retrait (hygiène des mains et port de gants stériles);	☐	☐	☐	☐	
	6.2 Retirer la sonde ETO du contenant de trempage;	☐	☐	☐	☐	
	6.3 Immerger la sonde ETO à 40 CM (sans la poignée, le câble et le connecteur) dans un contenant d'eau stérile;	☐	☐	☐	☐	
	6.5 Chronométrer 1 minute.	☐	☐	☐	☐	

ACTIVITÉ DE BASE	ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ	ÉLÉMENT OBSERVÉ	ÉLÉMENT OBSERVÉ PARTIEL	ÉLÉMENT NON OBSERVÉ	N/A	COMMENTAIRES
7. SÉCHAGE	Séchage manuel post désinfection non automatisée :					
	7.1 Sortir la sonde ETO de l'eau stérile et disposer de l'eau stérile ;	☐	☐	☐	☐	
	7.2 Essuyer l'extérieur de la sonde ETO avec un linge propre, doux et non pelucheux;	☐	☐	☐	☐	
	7.3 Mettre la sonde ETO dans le bac de transport « propre »;	☐	☐	☐	☐	
	7.4 Nettoyer l'évier avec la lingette approprié (type <i>Accel TB</i>);	☐	☐	☐	☐	
	7.5 Retirer les ÉPI et hygiène des mains;	☐	☐	☐	☐	
	7.6 Transporter le bac, sur un chariot vers l'imagerie médicale;	☐	☐	☐	☐	
8. ENTREPOSAGE	8.1 Vérifier la propreté de l'armoire de rangement;	☐	☐	☐	☐	
	8.2 Placer la sonde ETO en position parfaitement verticale;	☐	☐	☐	☐	
	8.4 Fermer hermétiquement l'armoire de rangement;	☐	☐	☐	☐	
	8.5 S'assurer du bon fonctionnement de la ventilation.	☐	☐	☐	☐	
Nombre total d'éléments de conformité audités						

Nom de l'auditeur :

Titre d'emploi de la personne auditée :

Principales recommandations :