

<u>À vérifier</u>	<u>Fait et ok</u>	<u>Fait et changé / ajouté</u>
Ouverture de l'appareil	☐	☐
Entrée d'eau (+/- 35°C et 30 à 40 PSI)	☐	☐
Température d'eau à 35°C (+/- 2°C)	☐	☐
Pression air principale (42 à 45 PSI)	☐	☐
Pression test étanchéité (3,6 à 3,75 PSI)	☐	☐
Quantité de détergent	☐	☐
Qualité du désinfectant (bandelette OK et moins de 21 jours)	☐	☐
Quantité du désinfectant	☐	☐
Quantité d'alcool	☐	☐
Papier imprimante suffisant	☐	☐
Intégrité des filtres (date installation ou date de remplacement)	☐	☐
Intégrité des joints toriques	☐	☐
Date et heure de l'appareil	☐	☐