


Vérification hebdomadaire laveur automatique d'endoscope « URAE EDGE »

VÉRIFICATION HEBDOMADAIRE :

- 1. Placez un contenant sous le filtre pour récolter les excédents de liquide au besoin
- 2. Retirez le couvercle du filtre en le dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3. Retirez l'écran du filtre en tirant depuis le couvercle.
- 4. Nettoyez le filtre à l'eau et retirez tous les débris.
- 5. Remplacez l'écran de filtre dans le couvercle du boîtier, en vous assurant que les joints toriques sont dans les bons emplacements et sont bien lubrifiés.
- 6. Remplacez le couvercle du filtre et serrez-le à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.

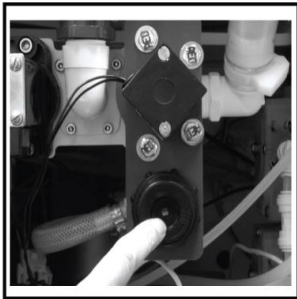

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
Inspecter et nettoyer les filtres à désinfectant																					
Lubrification des O'ring des adaptateurs																					
Technicien																					

Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales