

POLITIQUES ET PROCÉDURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Titre : Procédure concernant l'utilisation du laveur-désinfecteur thermique	No :
Responsable : Direction des soins infirmiers Prévention et contrôle des infections	☐ Adopté le / ☐ Révisé le : ☐ Remplace le :

Les bactéries, les virus et les autres microorganismes, qui se retrouvent dans l'environnement, peuvent se transmettre par des accessoires manipulés ou nettoyés de manière inadéquate. L'utilisation du laveur-désinfecteur permet de nettoyer/désinfecter les équipements réutilisables, convenablement, en éliminant grandement la contamination croisée.

Buts :

- Offrir à notre clientèle des équipements nettoyés/désinfectés de façon optimale et sécuritaire.
- Diminuer le risque de contamination croisée.

Fonctions du laveur-désinfecteur thermique : Vider, rincer, nettoyer et désinfecter.

Équipement souillé convenant au support universel

- bassin hygiénique (sous la chaise d'aisance);
- bassines (régulières ou orthopédiques);
- urinaux;
- bassin rectangulaire.

Indications de l'utilisation du laveur-désinfecteur

Bassines souillées de selles

- Porter des gants
- Recouvrir la bassine d'une serviette pour le transport
- Déposer directement la bassine (avec les selles) dans le laveur-désinfecteur
- Enlever les gants
- Actionner le cycle intensif
- Laver les mains

☀ ***Bassines souillées de selles des patients en technique d'isolement***

Après avoir retiré l'équipement de protection à la sortie de la chambre, remettre de nouveaux gants avant de vous diriger vers le laveur-désinfecteur.

☀ ***Au congé de tous les patients***

- Tout l'équipement réutilisable mentionné doit être nettoyé/désinfecté dans l'appareil.
- Pour les patients en technique d'isolement, l'équipement (vidé et rincé) sera déposé dans un sac en plastique clair et déposé dans l'utilité souillée afin d'être nettoyé/désinfecté dans l'appareil.
- Lorsque le laveur-désinfecteur est en fonction, le dessus de l'appareil ou autre endroit déterminé (zone contaminée) servent à recevoir l'équipement contaminé en attente d'être nettoyé-désinfecté.

PROCÉDURE du laveur-désinfecteur

Important : Selon les recommandations des pratiques de base, s'il y a des risques d'éclaboussures, le port de l'équipement de protection est indiqué (masque, protection oculaire, blouse à manches longues, gants).

1. **Inspecter l'équipement réutilisable** Si présence de substances organiques séchées ou résidus de savon : **pré-laver** les souillures en frottant avec un linge imbibé de germicide;
2. **Positionner correctement l'équipement dans l'appareil** Se référer au pictogramme du fabricant affiché sur l'appareil;
3. **Retirer ses gants**;
4. **Actionner le cycle intensif** Ce cycle assure un nettoyage et une désinfection optimale entre 2 patients;
5. **Laver les mains**;
6. **À la fin du cycle** Laver les mains avant de décharger le contenu de l'appareil afin d'éviter une contamination croisée;
7. **Assécher et ranger les équipements propres** aux endroits prévus à cet effet.