



Rappel du positionnement des usagers avec le lit Umano

Le lit peut vous aider

Nous vous invitons à consulter la capsule Rappel du positionnement du lit Umano (Modèle Ook Snow FL36).

Cette courte vidéo met en lumière plusieurs options technologiques intégrées au lit, conçues pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, notamment pour:

- Faciliter le rappel de repositionnement de l'utilisateur
- Réduire les risques pour l'intervenant
- Favoriser la sécurité et le confort de l'utilisateur
- Standardiser les bonnes pratiques au sein des équipes cliniques

Nous vous encourageons à prendre quelques minutes pour la visionner et intégrer le rappel du positionnement dans votre pratique quotidienne.

Étapes pour le rappel du positionnement:

- 1 Sélectionner le pictogramme d'information dans la bibliothèque du menu **Inform**.
- 2 Programmer le rappel de positionnement en choisissant un délai entre 5 minutes et 2 heures.
- 3 Activer le rappel pour que le lit émette une alarme à l'expiration du délai.
- 4 Choisir le mode de réception de l'alarme: appel infirmier ou alarme sonore dans la chambre.
- 5 Vérifier que le pictogramme sélectionné et le rappel apparaissent sur l'écran de veille.

Lit Umano Ook Snow FL36

[Regarder la capsule vidéo](#)

