

**DESTINATAIRES :** Tous les utilisateurs des laboratoires de la Montérégie et les gestionnaires cliniques hors hôpitaux intra-CISSS qui acheminent des échantillons du laboratoire

**EXPÉDITEUR :** Sébastien Bérubé-Couture, coordonnateur clinico-administratif des laboratoires  
Direction régionale des laboratoires

**DATE :** Le 4 juin 2026

**OBJET :** **Rappel : Instructions à l'usager et étiquette d'identification des contenants d'urine 24 heures**

Par la présente, nous souhaitons vous rappeler l'utilisation de l'instruction à l'usager ainsi que de l'étiquette destinée au contenant d'urine 24 heures développée par les laboratoires.

## Étiquette :

L'étiquette est disponible via le logiciel de commande GRM. Cette étiquette contient les informations nécessaires à l'exécution des analyses des urines 24 h. **Elle a pour but de régler une problématique de rejet des échantillons lors de l'absence de renseignements cliniques obligatoires, soit le poids et la taille de l'usager. Il est donc important de remplir tous les champs de l'étiquette.**

Vous devez vous procurer ces étiquettes à l'aide des codes GRM ci-dessous (les étiquettes fournies avec le contenant 24 h ne doivent pas être utilisées) :

|                                                                                                                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>Centre intégré<br/>de santé et de<br/>services sociaux de<br/>la Montérégie-Centre</p> <p>Québec</p>                                   |                                                                          |
| PRÉNOM:                                                                                                                                   |                                                                          |
| NOM:                                                                                                                                      |                                                                          |
| # RAMQ OU # DOSSIER :                                                                                                                     |                                                                          |
| POIDS _____ <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lbs                                                                      | TAILLE _____ <input type="checkbox"/> cm <input type="checkbox"/> pouces |
| <b>DÉBUT DE LA COLLECTE DES URINES 24 HEURES</b><br>(Inscrire l'heure de la 1 <sup>ère</sup> urine du matin jetée dans la toilette)       |                                                                          |
| DATE : _____ HEURE : _____                                                                                                                |                                                                          |
| <b>FIN DE LA COLLECTE DES URINES 24 HEURES</b><br>(La 1 <sup>ère</sup> urine du lendemain matin doit être incluse et termine la collecte) |                                                                          |
| DATE : _____ HEURE : _____                                                                                                                |                                                                          |

| DESCRIPTION       |                                                                                                   | CODE D'ARTICLE | UNITÉ DE DISTRIBUTION |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>GRM CISSMC</b> |                                                                                                   |                |                       |
| 500600            | Français :<br>GAB1-DRL-BIO001-V1-FR <i>Étiquettes — Urine 24 heures sans préservatif</i>          | 7046GAB1F      | Rouleau<br>250 unités |
| 500601            | Anglais :<br>GAB1-DRL-BIO001-V1-ANG <i>Labels — 24-hour urine collection without preservative</i> | 7046GAB1A      | Rouleau<br>250 unités |
| <b>GRM CISSME</b> |                                                                                                   |                |                       |
| 4103357           | Français :<br>GAB1-DRL-BIO001-V1-FR <i>Étiquettes — Urine 24 heures sans préservatif</i>          | 7046GAB1F      | Rouleau<br>250 unités |
| 4103358           | Anglais :<br>GAB1-DRL-BIO001-V1-ANG <i>Labels — 24-hour urine collection without preservative</i> | 7046GAB1A      | Rouleau<br>250 unités |
| <b>GRM CISSMO</b> |                                                                                                   |                |                       |
| 1129380           | Français :<br>GAB1-DRL-BIO001-V1-FR <i>Étiquettes — Urine 24 heures sans préservatif</i>          | 7046GAB1F      | Rouleau<br>250 unités |
| 1129381           | Anglais :<br>GAB1-DRL-BIO001-V1-ANG <i>Labels — 24-hour urine collection without preservative</i> | 7046GAB1A      | Rouleau<br>250 unités |

**Pour l'instruction à l'utilisateur (versions française et anglaise) :** veuillez consulter le répertoire des analyses via le code QR ci-dessous pour accéder à l'instruction de votre CISSS.



Nous comptons sur votre participation pour utiliser ces étiquettes.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter votre laboratoire.

Merci de votre précieuse collaboration.