

DESTINATAIRES : À tout le personnel clinique du CISSSMO

EXPÉDITEUR : Roxanne Forgues, Conseillère en soins infirmiers, DSIEU

DATE : Le 29 juillet 2021


OBJET : **RAPPEL**- Nouvelle Connexion ENFIT

Afin de contribuer à diminuer la fréquence des problèmes de branchement des tubulures entérales, tous les produits de nutrition entérale seront dotés de connecteur ENFIT à partir du 15 décembre 2020. Les sondes de gastrostomie installée au CISSSMO à partir de cette date auront aussi la connexion ENFIT.

Transition ENFit®

Ancienne connexion

Nouvelle connexion ENFit®

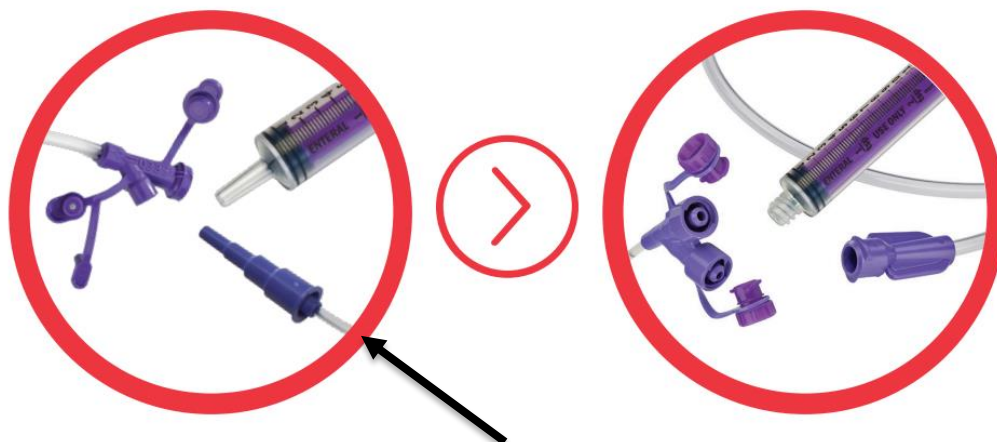

Vous trouverez le nouveau connecteur ENFIT en dévissant la partie conique de votre tube d'alimentation standard (produit présentement utilisé au CISSSMO).

Des seringues ENFIT sont disponibles sur les chariots 24 h. Les seringues standards ne sont pas compatibles avec la nouvelle connexion ENFIT. Des raccords de transition (partie conique) individuels sont aussi disponibles.

Les GRM sont les suivants :

Format de 3ml : 1066208

Format de 12ml :1066209

Format de 60ml :1066210



Raccord de transition: 1069615

Ci-joint, une suggestion de la compagnie Cardinal Health pour le positionnement du raccord ENFIT.

Pour toute question en lien avec ce changement, veuillez communiquer avec Roxanne Forgues, Conseillère en soins infirmiers, DSIEU.

Merci de votre collaboration.

RF

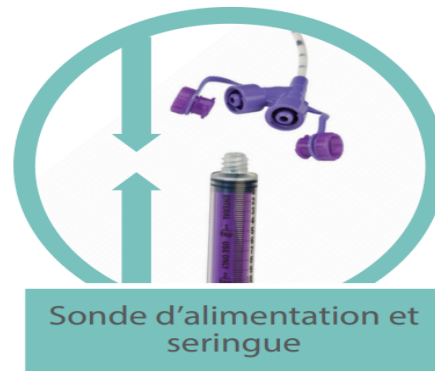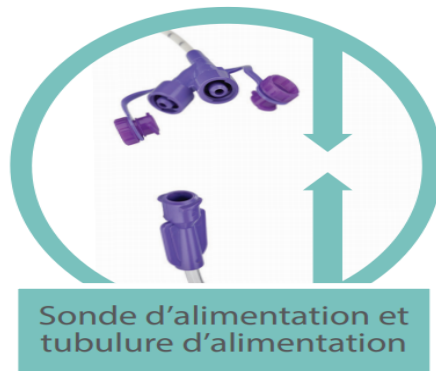

Suggestion de **positionnement** du **raccord ENFit^{MC*}** lors du branchement

Positionner la **sonde d'alimentation vers le bas** lors du branchement peut **prévenir l'accumulation de préparation** dans la cavité.

Toute accumulation **potentielle dans la cavité peut compliquer** le débranchement de la sonde d'alimentation lorsque la préparation a séché

Avertissement :
Ne serrez pas trop le raccord.

