

DESTINATAIRES : À tout le personnel clinique du CISSSMO

EXPÉDITEUR : Roxanne Forgues, Conseillère en soins infirmiers, DSIEU

DATE : Le 24 février 2021

OBJET : **RAPPEL**- Nouvelle Connexion ENFIT


Afin de contribuer à diminuer la fréquence des problèmes de branchement des tubulures entérales, tous les produits de nutrition entérale pourraient être dotés de connecteur ENFIT.

Veuillez prendre note que les tubes d'alimentation sont compatibles pour le moment avec les deux types de connexion.

Transition ENFit®

Ancienne connexion

Nouvelle connexion ENFit®

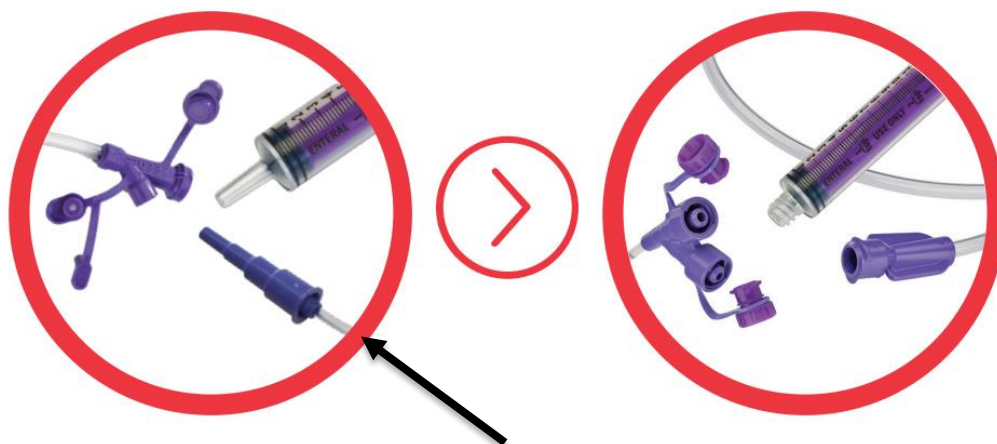

Vous trouverez le nouveau connecteur ENFIT en dévissant la partie conique de votre tube d'alimentation standard (produit présentement utilisé au CISSSMO).

Des seringues ENFIT sont disponibles sur les chariots 24 h. Les seringues standards ne sont pas compatibles avec la nouvelle connexion ENFIT. Des raccords de transition (partie conique) individuels sont aussi disponibles.

Les GRM sont les suivants :

Format de 3ml : 1066208

Format de 12ml :1066209

Format de 60ml :1066210


Raccord de transition: 1069615

Ci-joint, une suggestion de la compagnie Cardinal Health pour le positionnement du raccord ENFIT.

Pour toute question en lien avec ce changement, veuillez communiquer avec Roxanne Forgues, Conseillère en soins infirmiers, DSIEU.

Merci de votre collaboration.

RF

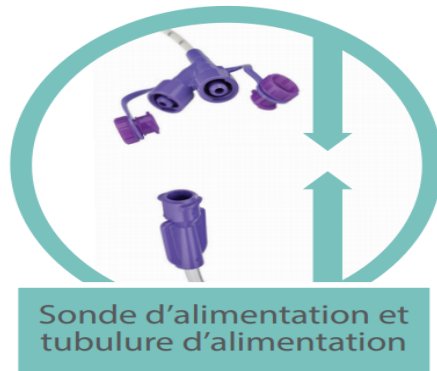

Suggestion de **positionnement** du **raccord ENFit^{MC*}** lors du branchement

Positionner la **sonde d'alimentation vers le bas** lors du branchement peut **prévenir l'accumulation de préparation** dans la cavité.

Toute accumulation **potentielle dans la cavité peut compliquer** le débranchement de la sonde d'alimentation lorsque la préparation a séché

Avertissement :
Ne serrez pas trop le raccord.

