

Recommandations suppléance rénale

Le service de prévention et contrôle des infections émet les directives suivantes dans l'attente de pouvoir insérer ces informations dans les procédures d'utilisation du matériel qui seront émises par le service de la suppléance rénale.

DÉSINFECTION DU FAUTEUIL DE DIALYSE ET ITEMS DE L'ENVIRONNEMENT DU PATIENT

SURFACES	SITUATION ET PRODUITS	FRÉQUENCE	INTERVENANT
Toutes les surfaces en contact avec le patient : Fauteuil, cloche d'appel, table, manette de télévision, etc.	Régulier et précautions additionnelles contact (SARM, MDRO etc.): Ammonium quaternaire (Virex) en 1 étape	Après chaque traitement	PAB
	Précautions additionnelles contact (ERV, EPC etc.): Ammonium quaternaire en 2 étapes	Après chaque traitement	PAB
	Précautions additionnelles entériques (clostridium difficile, gastro entérite): 3 étapes 1 ^{ère} étape germicide 2 ^{ème} étape rinçage eau 3 ^{ème} étape solution chlorée	Après chaque traitement effectué en fin de journée ou ne pas utiliser l'endroit avant la désinfection par hygiène et salubrité	Préposé HS

DÉSINFECTION EXTÉRIEURE DU SYSTÈME DE DIALYSE

SURFACES	SITUATION ET PRODUITS	FRÉQUENCE	INTERVENANT
Toutes les surfaces de l'appareil sauf l'écran qui est toujours fait avec de l'alcool.	Régulier et précautions additionnelles contact (SARM, MDRO etc.): Ammonium quaternaire en 1 étape	Après chaque traitement	PAB
	Précautions additionnelles contact (ERV, EPC etc.): Ammonium quaternaire en 2 étapes	Après chaque traitement	PAB
	Précautions additionnelles entériques (clostridium difficile, gastro entérique): 1 étape avec les lingettes d'hypochlorite de sodium (Clorox)	Traitement effectué en fin de journée, les autres équipements doivent être désinfectés par le service d'hygiène et salubrité	PAB
Écran	Régulier et précautions additionnelles: Alcool 60% écran à faire à 2 reprises	Après chaque traitement	PAB

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES :

- Le temps de contact avec les produits doit être respecté : Virex 10 minutes, Ultra Wipes 10 minutes. Clorox 3 minutes pour le *clostridium difficile*.
- S'assurer de respecter le temps de stabilité des produits, notamment lors de l'utilisation de chaudières de lingettes disposables.

Annie Marceau
Coordonnatrice prévention et contrôle des infections
Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest
Hôpital Anna-Laberge
200, Boulevard Brisebois
Châteauguay (Québec) J6K 4W8