
DESTINATAIRES : Gestionnaires du personnel clinique et personnel clinique

EXPÉDITEUR : Fayez Aidibe, chef de service du génie biomédical

DATE : Le 2025-02-0

OBJET : **Avis de risque sur équipement médical : H0964 - Problème de sécurité des médicaments liés aux pompes à perfusion**

Des événements indésirables en lien avec les pompes à perfusion ont été rapportés. Ces événements sont fréquemment liés à des erreurs d'utilisation ou à des dommages à l'appareil. Les dommages suivants sont notamment mentionnés :

- Des portes qui ne se ferment pas complètement affectant le mécanisme de contrôle du flux.
- Des charnières de porte cassées ou fissurées pouvant altérer la compression de l'ensemble d'administration et interférer avec le mécanisme de pompage.
- Des verrous de porte cassés qui interfèrent avec l'activation du mécanisme de protection contre l'écoulement libre de la pompe.
- Des connecteurs externes ou contacts du bloc-batterie corrodés.
- Des fissures dues aux contraintes environnementales dans les composants en plastique causées par l'utilisation répétée de produits de nettoyage incompatibles.

Les dommages causés à une pompe à perfusion peuvent affecter sa capacité à administrer avec précision des fluides ou des médicaments, entraînant un risque d'erreur. De plus, un dommage restant inaperçu ou pas corrigé, peut mettre en danger le patient.

Équipement(s) visé(s) par l'avis

Équipement(s) : Pompe à perfusion

Fabricant(s) : Tous

Modèle(s) : Tous

Nous vous invitons à lire l'avis de risque sur équipement médical complet.

[AVIS-H0964 Problème de sécurité des médicaments liés aux pompes à perfusion](#)

Pour toutes questions en lien avec cet avis, veuillez communiquer avec le service du génie biomédical à l'adresse suivante : alertesmedicales.gbm.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

FA