



DESTINATAIRES : Chefs d'unité - HAL
Coordonnateurs des activités de soins - HAL

EXPÉDITEUR : Annie Marceau, responsable prévention et contrôle des infections - JR

DATE : Le 7 novembre 2016

OBJET : **Rupture de stock chlore stabilisé en pastille – remplacement temporaire de produit**

Bonjour,

Il y a présentement une rupture de stock pour le produit de chlore stabilisé en format pastille (Zochlor) utilisé pour le trempage des supports de bassines et de chaises d'aisance et nous devons ainsi procéder à un remplacement temporaire du produit pour le trempage de ces équipements.

Ces équipements de soins partagés doivent être nettoyés et désinfectés de façon rigoureuse en atteignant une concentration d'au minimum de 2000 ppm tel que spécifié dans la procédure interne *nettoyage et désinfection des petits équipements, méthode d'utilisation du Zochlor*. Voici les indications d'utilisation du produit de remplacement :

La partie de la procédure nommée traitant du nettoyage doit être respectée. Toutefois, pour la préparation chlorée, elle sera préparée comme suit :

Ajouter le contenant au complet (4 L) de chlore liquide stabilisé concentré (Ali-Flex LF) aux 40 Litres d'eau à température ambiante. Remplacer la solution chaque quart de travail et ajouter vos initiales au registre. La concentration atteinte sera de 2272 ppm. Tout comme mentionné dans la procédure, vous devez porter l'équipement de protection individuelle lors de la préparation des bacs de trempage compte tenu des risques d'éclaboussures (masque de procédure, lunette et blouse de protection ainsi que des gants à usage unique).

AM

p.j. Registre de signature.

RÉFÉRENCE

Lalema (2015). Bulletin technique Ali-flex LF. *Nettoyant désinfectant chloré à faible mousse*. Repéré à http://www.lalema.com/bt/fr/BT_aliflex_LF.pdf