

Systeme MINI-BAG Plus

Conçu pour être utilisé seulement avec des fioles pour dose unique de médicament en poudre standard avec un col de 20 mm de diamètre (Utilisez une technique aseptique)

CONSEILS RAPIDES :

- Ne faites pas de mouvement de torsion avec la poche lorsque vous connectez la fiole (le perforateur interne peut s'endommager)

- Une fois connectée, la fiole reste fixée à la poche pour maintenir un système clos
- Avant l'administration, assurez-vous que le médicament est entièrement dissout et que la fiole est vide

- Si du liquide fuit de nouveau dans la fiole après avoir terminé la reconstitution, jetez le système

> DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE

1

20mm

capuchon de la fiole

système de fermeture

fiole de médicament

- Retirez le capuchon de la fiole
- Désinfectez le bouchon

2

poche

Contenant MINI-BAG Plus

sceau d'étanchéité à rompre (à l'intérieur du tube de l'orifice de remplissage)

adaptateur à fiole de médicament

orifice d'administration

embout de protection

opercule

- Retirez l'opercule
- Observez l'adaptateur pour détecter toute trace d'humidité
- Jetez s'il y a de l'humidité

3

Mettez la fiole en position droite et tenez-la fermement

Appuyez fermement l'adaptateur sur la fiole pour qu'elle s'enclenche dedans

- NE FAITES PAS DE MOUVEMENT DE ROTATION

Tirez sur la fiole pour vous assurer qu'elle est fermement enclenchée

> DIRECTIVES POUR LA RECONSTITUTION

4

Comprimez la poche et observez la fiole

N'utilisez que si la fiole est fermement enclenchée et sèche

Inclinez-la vers le bas puis vers le haut pour rompre le sceau d'étanchéité

5

Tenez la poche avec la fiole en bas

Comprimez la poche pour forcer l'entrée de la solution dans la fiole jusqu'à ce que celle-ci soit remplie à moitié

Agitez pour que le médicament entre en suspension dans la solution

6

Tenez la poche avec la fiole à l'envers

Comprimez la poche afin de forcer l'entrée d'air dans la fiole

Relâchez afin que le médicament en suspension dans la fiole s'écoule

Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que la fiole soit vide et la solution complètement mélangée

Assurez-vous que le médicament est complètement dissout

- NE DÉCONNECTEZ PAS LA FIOLE

> DIRECTIVES POUR L'ADMINISTRATION

7

- Retirez l'embout de protection de l'orifice d'administration
- Fixez le dispositif de perfusion selon les directives

8

- Suspendez le contenant à la potence de perfusion i.v. et amorcez le dispositif selon les directives
- Assurez-vous qu'il n'y a plus de solution et de médicament dans la fiole. Répétez l'étape 6 s'il y a encore de la solution et du médicament dans la fiole
- AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER AVEC DES RACCORDS EN SÉRIE**

9

- Administrez le médicament conformément aux directives
- Utilisez dans les délais prescrits afin d'assurer la stabilité du médicament
- Consultez la notice d'emballage du médicament

Pour commander le système MINI-BAG Plus, appelez le 1888 719-9955

Corporation Baxter, 7125, Mississauga Road, Mississauga (Ontario) L5N 0C2

Copyright 2017, Corporation Baxter. Tous droits réservés. Baxter est une marque de commerce de Baxter International Inc. CAMP/MG61/16-0002a 07/17

Système **MINI-BAG** Plus

Conçu pour être utilisé seulement avec des fioles pour dose unique de médicament en poudre standard avec un col de 20 mm de diamètre (Utilisez une technique aseptique)

CONSEILS RAPIDES :


- Ne faites pas de mouvement de torsion avec la poche lorsque vous connectez la fiole (le perforateur interne peut s'endommager)
- Une fois connectée, la fiole reste fixée à la poche pour maintenir un système clos
- Avant l'administration, assurez-vous que le médicament est entièrement dissout et que la fiole est vide
- Si du liquide fuit de nouveau dans la fiole une fois la reconstitution terminée, jetez le système



- Comprimez la poche et observez la fiole
- N'utilisez que si la fiole est fermement enclenchée et sèche
- Inclinez-la vers le bas puis vers le haut pour rompre le sceau d'étanchéité



- Tenez la poche avec la fiole en bas
- Comprimez la poche pour forcer l'entrée de la solution dans la fiole jusqu'à ce que celle-ci soit remplie à moitié
- Agitez pour que le médicament entre en suspension dans la solution

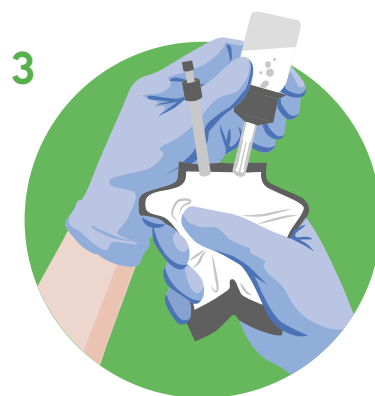

- Tenez la poche avec la fiole à l'envers
- Comprimez la poche afin de forcer l'entrée d'air dans la fiole
- Relâchez afin que le médicament en suspension dans la fiole s'écoule
- Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que la fiole soit vide et la solution complètement mélangée
- Assurez-vous que le médicament est complètement dissout
- **NE DÉCONNECTEZ PAS LA FIOLE**

4

- Retirez l'embout de protection de l'orifice d'administration
- Fixez le dispositif de perfusion selon les directives

5

- Suspendez le contenant à la potence de perfusion i.v. et amorcez le dispositif selon les directives
- Assurez-vous qu'il n'y a plus de solution et de médicament dans la fiole. Répétez l'étape 6 s'il y a encore de la solution et du médicament dans la fiole
- **AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER AVEC DES RACCORDS EN SÉRIE**

6

- Administrez le médicament conformément aux directives
- Utilisez dans les délais prescrits afin d'assurer la stabilité du médicament
- Consultez la notice d'emballage du médicament

Pour commander le système MINI-BAG Plus, appelez le 1 888 719-9955

Corporation Baxter, 7125, Mississauga Road, Mississauga (Ontario) L5N 0C2