

Système de compression Kendall SCD SmartFlow^{MC} de Cardinal Health^{MC}



Produits	Système Kendall SCD SmartFlow ^{MC}	Kendall SCD ^{MC} 700
Hauteur	17,1 cm (6,75 po)	17,6 cm (6,94 po)
Hauteur (au-dessus du pied de lit)	8,0 cm (3,15 po)	9,2 cm (3,6 po)
Largeur	19,2 cm (7,55 po)	19,9 cm (7,84 po)
Profondeur (de l'avant au pied du lit)	10,0 cm (3,95 po)	11,7 cm (4,6 po)
Poids (avec le cordon d'alimentation)	2,18 kg (4,8 lb)	2,5 kg (5,5 lb)
Matériau du boîtier	Copolyester Tritan MXF321	Polycarbonate Xylex X8300
Protection contre les infiltrations (résistance à l'eau)	IPX4 (protection contre les éclaboussures d'eau dans toutes les directions)	IP23 (protection contre l'eau pulvérisée à 60 degrés à la verticale)
Indications cliniques	Prévention de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire Avec des jambières à compression séquentielle : - Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire - Traitement de la douleur et de l'enflure liées à la stase veineuse - Amélioration de la circulation Avec des jambières à compression postérieure : - Thrombose veineuse profonde Avec des chaussons : - Amélioration de la circulation (sans marquage CE seulement) - Thrombose veineuse profonde - Œdème : aigu et chronique (sans marquage CE seulement) - Douleur aux extrémités due à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale (sans marquage CE seulement) - Ulcères de jambe (sans marquage CE seulement) - Stase veineuse (sans marquage CE seulement)	Prévention de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire Avec des jambières à compression séquentielle : - Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire Avec des chaussons : - Amélioration de la circulation (sans marquage CE seulement) - Thrombose veineuse profonde - Œdème : aigu et chronique (sans marquage CE seulement) - Douleur aux extrémités due à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale (sans marquage CE seulement) - Ulcères de jambe (sans marquage CE seulement) - Stase veineuse (sans marquage CE seulement)
Autonomie de la pile	6-8 heures	6-8 heures
Bruit de fonctionnement	40 dBA (test interne). Ventilateur retiré	42 dBA (test interne). Ventilateur de refroidissement inclus
Gradients de pression de compression	3-vessie 45, 40, 30 mm Hg (première, deuxième, troisième vessie) Chausson Vessie 2 : 130 +/- 5 mm Hg	3-vessie 45, 40, 30 mm Hg (première, deuxième, troisième vessie) Chausson Vessie 2 : 130 +/- 5 mm Hg
Surveillance de l'observance du traitement par le patient	Surveillance de l'observance du traitement par le patient	Surveillance de l'observance du traitement par le patient
Suivi du traitement	Vue de l'écran principal avec indicateur visuel	Accessible en appuyant sur la touche de la flèche vers la droite. Pas d'indicateur visuel
Historique du traitement	6 jours d'historique avec indication visuelle de chaque jour	Non disponible

Option de retour en arrière	Disponible à 8, 12 ou 24 heures	Disponible à 8, 10 ou 12 heures
Détection du remplissage veineux	✓ Oui Le temps entre les cycles est de 20 à 60 secondes, selon la détection – mesure le temps nécessaire pour que la pression dans un membre devienne stable	✓ Oui Le temps entre les cycles est de 20 à 60 secondes, selon la détection – mesure le temps nécessaire pour que la pression dans un membre devienne stable
Animation de la détection du remplissage veineux	Standard	Non disponible
Mode de démonstration de la détection du remplissage veineux	Standard	Non disponible
Détection de vêtements	✓ Oui Remplit les vessies et détecte les pressions – lecture sur 1 – jambière, lecture sur 2 mais pas sur 1 – chausson	✓ Oui Remplit les vessies et détecte les pressions – lecture sur 1 – jambière, lecture sur 2 mais pas sur 1 – chausson
Détection du patient	✓ Oui Oui, vérifie la pression des membres du patient toutes les 30 minutes. - Alerte/alarme s'il n'y a pas de patient, nécessite une réinitialisation manuelle pour s'arrêter	✓ Oui Vérifie la pression des membres du patient toutes les 30 minutes. - Alerte/alarme s'il n'y a pas de patient, nécessite une réinitialisation manuelle pour s'arrêter
Flexibilité/plage du crochet de lit (Taille maximale de la ridelle)	1,90-8,25 cm (0,75-3,25 po) d'épaisseur	8,25 cm (3,25 po)
Démarrage	1 bouton de démarrage pour les jambières et les chaussons	1 bouton de démarrage pour les jambières 2 boutons pour les chaussons
Pause du traitement	Un bouton-poussoir	Non disponible
Port USB	✓ Oui	✓ Oui
Longueur de la tubulure	167 et 335 cm (66 et 132 po)	91 et 213 cm (36 et 84 po)
Caractéristiques de la tubulure (p. ex. texture lisse, couleur, épaisseur, poids)	Tubulure dotée de 6 lumières (3 fonctionnelles) Tubulure lisse Couleur grise Ne peut être branchée en série	Tubulure non lisse à 3 lumières Transparente Peut être branchée en série
Taille du connecteur (p. ex. quel est le diamètre/la largeur/la profondeur du connecteur de la tubulure, dans certains cas il peut y avoir un risque d'ulcères de pression)	Longueur : 32,35 mm (1,27 po) Largeur : 40,27 mm (1,59 po) Hauteur : 20,39 mm (0,80 po)	Longueur : 26,035 mm (1,025 po) Largeur : 32,832 mm (1,293 po) Hauteur : 15,443 mm (0,608 po)
Conception du connecteur	Connecteur réversible	Connecteur unidirectionnel
Type d'écran	Écran LCD – pas d'écran tactile, en couleur	Écran LCD – pas d'écran tactile, en couleur
Mode nuit ou écran à intensité réglable	✓ Oui – mode nuit	x Non
Jambières	Comfort, au genou : TP, P, M et G Comfort, à la cuisse : TP, P, M et G Express, au genou : M, G et TG Express, à la cuisse : P, M et G Chausson : D et G	Comfort, au genou : TP, P, M et G Comfort, à la cuisse : TP, P, M et G Express, au genou : M, G et TG Express, à la cuisse : P, M et G Chausson : D et G
Visualisation des alarmes	Erreur animée couvrant tout l'écran pour éviter de regarder le mode d'emploi	Erreur animée couvrant tout l'écran pour éviter de regarder le mode d'emploi



Réimaginer le déroulement des soins par compression
Savoir en plus : CardinalHealth.ca/Kendall-SCD

Information importante : Avant d'utiliser le dispositif, consultez le mode d'emploi pour connaître les indications, les contre-indications, la procédure suggérée, les mises en garde et les précautions.

© 2025 Cardinal Health. Tous droits réservés. Cardinal Health, Kendall SCD et Kendall SCD Smartflow sont des marques de commerce de Cardinal et peuvent être déposées.
No de document CA : 25-115 (08/2025)