

Direction des soins infirmiers et de la qualité

PROCÉDURE DU SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Section : Utilisation des appareils		No
Méthode : Transport des bassins vers le macérateur (Vernacare)		Page 1 de 2
Préparé par : Annie Marceau, coordonnatrice de la prévention et contrôle des infections	Approuvé par : Sylvie Girard, cadre supérieure intérimaire à la direction des soins infirmiers et de la qualité	Date : 2015-07-29
		Révision :
1. Description Le transport des bassins souillés qui contiennent des liquides biologiques vers le macérateur est une activité à réaliser selon les normes afin de limiter la transmission des bactéries multi-résistantes¹ et des infections. 2. Buts • Prodiguier des soins de qualité et sécuritaires; • Assurer le transport sécuritaire des liquides biologiques; • Prévenir la transmission de BMR et d'infections; • Prévenir la contamination croisée et les éclaboussures. 3. Matériel requis • Bassins (bassine, urinal et haricot); • Sac de transport en papier (Vernacare); • Gants; • Solution hydro-alcoolique.		

¹ BMR : Bactérie multi-résistante

PROCÉDÉS	PRINCIPES
Lors de l'utilisation d'une bassine, d'un urinal ou d'un haricot : 1. Dans la chambre de l'usager; porter des gants propres. 2. Recouvrir la bassine, l'urinal ou le haricot du sac de papier conçu à cet effet. 3. Se diriger dans l'utilité souillée directement. 4. Ouvrir le macérateur en activant la commande avec le pied. 5. Placer la bassine, l'urinal ou le haricot dans le macérateur en y laissant le sac de transport. 6. Retirer les gants de façon sécuritaire et les jeter dans la poubelle. 7. Procéder à l'hygiène des mains. 8. Fermer le couvercle du macérateur. 9. Refaire l'hygiène des mains.	S'assurer d'avoir retiré les gants ayant servi aux soins de l'usager. Protéger le personnel contre les éclaboussures et les souillures. S'assurer de ne rien toucher en chemin. Le sac de papier est conçu pour le transport sécuritaire et est détruit dans le macérateur de bassines. Afin de ne pas contaminer ses mains davantage. Le couvercle doit être manipulé avec des mains propres S'assurer de ne pas jeter les gants dans le macérateur ce qui causerait le bris de celui-ci. Respecter les pratiques de base.

Consultation

Dre Miguelle Sanchez, microbiologiste, présidente du comité de prévention et contrôle des infections
 Chantal Bélisle, infirmière conseillère en prévention et contrôle des infections
 Caroline Martel, infirmière conseillère en prévention et contrôle des infections



Cadre supérieure intérimaire à la direction des soins infirmiers
 et de la qualité

29-07-15

Date